

## ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmonte el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

## REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección o cambie la funda por una nueva.

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

## GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

Importado por:

**Ayudas Tecno Dinámicas S.L.**

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com



# AyudasDinámicas

## MANUAL DE USUARIO

### COJÍN DE ESPUMA VISCOELÁSTICA CON FORMA ANATÓMICA **VISCO FORM**



Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, lea detenidamente el manual del usuario.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cojín de espuma viscoelástica con forma anatómica y descarga para el cóccix. Funda de poliuretano (PU) impermeable y transpirable con base antideslizante.

### USO PREVISTO

Ayuda para la prevención y el tratamiento de las escaras.

### Indicaciones de uso

La forma anatómica del cojín necesita, para un buen posicionamiento sobre la silla :


- El tamaño del cojín ha de ser compatible con el tamaño de la silla.
- Es preferible no utilizar el cojín sobre una superficie exageradamente inclinada.
- Respetar bien los sentidos delante-detrás y arriba-abajo del cojín.

A fin de que el dispositivo conserve toda su eficacia, verifique que su peso esté comprendido entre los valores indicados en cada una de las tallas.

### Contraindicaciones

Escaras presentes en la zona de apoyo (salvo recomendación médica).

## ESPECIFICACIONES

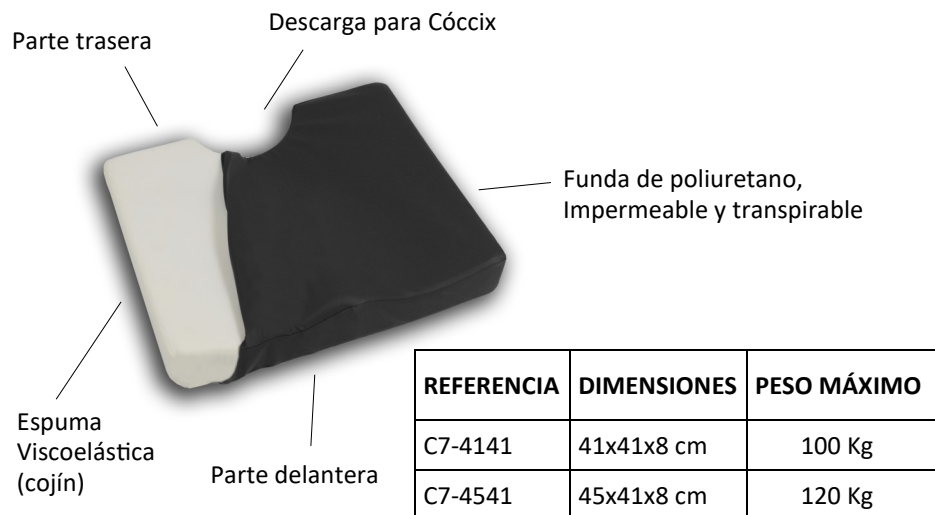

## PRECAUCIONES DE USO

-No interponer cuerpos extraños entre el paciente y el dispositivo, aparte la ropa.

-Se recomienda adquirir una funda de protección de recambio:

En uso mono-paciente y multi-paciente: para su utilización durante los lavados de la primera funda, a fin de evitar el contacto directo con la superficie del dispositivo.

En uso multi-paciente: al cambiar de paciente (el dispositivo debe ser lavado y descontaminado, como mínimo, con cada cambio de paciente).

-No se aconseja utilizar el dispositivo para otra parte del cuerpo que la prevista en su origen.

-Si constata un deterioro del producto (hundimiento de la espuma) o un efecto de punzonamiento, contacte con su distribuidor, a fin de que éste pueda ayudarle en la reparación o la renovación de su equipo.

## VIDA ÚTIL

La vida útil prevista para este producto es de tres años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA FUNDA


**Limpieza:** Limpieza de superficie con una toallita / esponja ligeramente impregnada con agua jabonosa y enjuagar con una toallita / esponja ligeramente humedecida con agua limpia.

**Desinfección:** Desinfección de la superficie con una toallita / esponja ligeramente impregnada con detergente desinfectante de superficie con un pH neutro, adaptado a los dispositivos médicos (respetando el modo operatorio recomendado por el fabricante del producto utilizado). Proceder a un enjuagado final con una toallita / esponja ligeramente humedecida con agua limpia. Secar bien. No utilizar productos corrosivos ni un material abrasivo. Lavado en lavadora (al menos cada 20 pulverizaciones con un detergente-desinfectante, a fin de eliminar cualquier residuo y liberar los poros de la funda).

Posibilidad de lavado a máquina hasta 40°C. Concentración máxima de cloro autorizada <1.000 ppm (en este caso, imprescindible aclarado con agua limpia). Dejar secar al aire NO utilizar secadora. No limpiar a seco. No utilizar ni productos corrosivos, ni material abrasivo.

### Precauciones a seguir:

- Dejar secar siempre la funda antes de volver a ponerla en el dispositivo (riesgo de mohos en caso de enfundar en dispositivo con una funda húmeda o mal secada).
- Controlar regularmente (en cada mantenimiento) el estado de la funda respecto a los desgarros, perforaciones y signos de abrasión, y dejar de utilizar el dispositivo si la funda presenta un defecto de integridad.
- Utilizar una funda de recambio idéntico si se utiliza el dispositivo durante el procedimiento de limpieza a máquina de la funda.

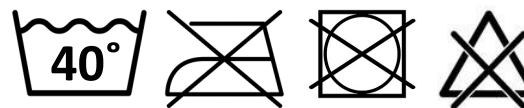

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL DISPOSITIVO

No se puede lavar la espuma viscoelástica. La funda impermeable evita que cualquier líquido pueda entrar en contacto con la espuma del cojín.