

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Ayudas Dinámicas



SILLA CON WC ADAS

Ref. HE400

Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, léalo detenidamente.

HE400 Silla con wc Cómoda silla con inodoro incorporado, su aspecto discreto disimula la función para la que ha sido fabricada. Pensada para personas que por algún motivo tienen dificultad para desplazarse hasta el lavabo. Fácil de limpiar y asiento regulable en altura.

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No utilizar si detecta que está en malas condiciones cualquiera de las partes de la silla.
- Asegúrese de regular las cuatro patas a la misma altura y comprobar que está en una superficie plana y estable.
- No exceda el peso máximo indicado en el manual y en la etiqueta del producto, que es de 125Kg.
- Asegúrese que el producto se adapta a las características y condición física del usuario.
- No debe subirse de pie en el asiento. No es apto para usarlo como elemento auxiliar de ascenso.

ANCHO	FONDO	ALTO	PESO	PESO MÁXIMO
57 cm	52 cm	83-93 cm	6,4 Kg	125 Kg

VIDA ÚTIL

La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmante el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto. No utilice el producto si presenta algún defecto.

Ayudas Tecno Dinámicas da por supuesto que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su nivel de riesgo o sus necesidades terapéuticas. Que el vendedor y cuidadores han determinado que proporcionará la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario. También que un profesional sanitario ha formado adecuadamente al cuidador y al usuario sobre la utilización del producto correctamente y de forma segura.

MONTAJE:



1. Abra el embalaje y extraiga todos los componentes tal como muestra la fotografía.



2. Abra el chasis de la silla tal como muestra la fotografía.

Para montar la guía de la cubeta, inserte los dos tubos en los alojamientos traseros de plástico del chasis hasta que los pivotes encajen y queden sujetos.



3. Presione los pivotes de la parte delantera de la guía de la cubeta e insértelos en los alojamientos delanteros de plástico del chasis hasta que los pivotes sobresalgan y asegúrese queden bien sujetos.



4. El anterior proceso se debe realizar en ambos lados del chasis de la silla. El montaje debería quedar igual que muestra la fotografía



5. Para montar el respaldo simplemente inserte los tubos en los alojamientos traseros del chasis de la silla. Debe asegurarse antes de seguir, que el respaldo está bien sujeto al chasis



6. Para montar el asiento en forma de “U”, coloque las dos grapas traseras en el tubo posterior del chasis de la silla. Asegúrese que han encajado correctamente y el asiento está plano.



7. Para colocar la cubeta debe levantar el asiento y colóquela en la guía hasta que haga tope en la parte delantera del chasis de la silla.



8. La silla incluye una tapa acolchada que cubre el asiento en forma de “U”. La tapa simplemente va sobrepuesta encima del asiento en “U”.

MANTENIMIENTO

Si se respetan las instrucciones de seguridad y limpieza indicadas a continuación, el producto no precisa ningún mantenimiento.

Para garantizar un óptimo funcionamiento y la máxima seguridad, deben realizarse periódicamente las siguientes comprobaciones:

- Compruebe con regularidad que el producto y los accesorios/opciones no estén dañados. No utilice el producto si está defectuoso.
- En caso de daño o de funcionamiento incorrecto, se recomienda ponerse en contacto con el proveedor.
- Asegúrese de que el producto está montado de forma segura y de que los tornillos y pasadores están apretados correctamente.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Las partes del chasis de la silla de ruedas se pueden limpiar con un paño húmedo. Se puede usar un agente de limpieza suave en el caso de suciedad más severa.

El material de tapicería se puede lavar con detergente suave hasta 40°C.

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmante el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

INFORME DE INCIDENTES:

Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este producto en info@ayudasdinamicas.com.

GARANTÍA

La garantía se extiende según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com