

patron[®]

MANUAL DE USUARIO PIPER



Manufacturing and Distribution:
PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419
CZ- 27601 Mělník, Česká Republika tel.: +420-315 630 111
fax.: +420-315 630 199
Info.cz@patro.eu [http:// www.patron.eu](http://www.patron.eu)

DATOS BÁSICOS

Altura del respaldo (mm)

Profundidad del asiento (mm)

Ancho del asiento (mm)

Distancia asiento al reposapiés (mm)

Ángulo del respaldo

Ángulo del asiento

Longitud total (mm)

Ancho total (mm)

Altura total / con mango (mm)

Peso total (kg)

Carga máxima (kg)

Longitud del cochecito plegado (mm)

Ancho del cochecito plegado (mm)

Altura del cochecito plegado (mm)

PRESENTACIÓN

Queridos clientes,

El cochecito Piper está diseñado para el paseo de niños con necesidades especiales. El chasis es completamente plegable, además de muy ligero. Lea atentamente sete manual, y en caso de que tenga alguna duda al respecto, póngase en contacto con su distribuidor oficial local para aclararla.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

¡ATENCIÓN! ¡Cualquier peso que se añada a la empuñadura (bolsa,...) afecta a la estabilidad del cochecito!

¡Las protecciones acolchadas laterales deben ser utilizadas correctamente todo el tiempo!

Presión de aire de los neumáticos recomendado: 230/230 kPa

¡El cierre de Velcro para el reposapiés debe sujetarse correctamente durante el uso del cochecito!

..... carga máxima

.....peso del producto

¡ATENCIÓN! No introducir los dedos en las partes móviles durante la manipulación del cochecito.

¡ATENCIÓN! ¡No deje nunca al niño sin supervisión! Incluso si los cinturones y frenos están en uso.

¡ATENCIÓN! Comprobar antes de su uso que todos los sistemas de cierre están correctamente cerrados y todos los sistemas de seguridad son correctamente utilizados.

¡ATENCIÓN! Comprobar antes de su uso que el asiento está correctamente acoplado al chasis.

¡ATENCIÓN! El asiento no es recomendable para niños menores de 6 meses.

¡ATENCIÓN! Este producto no debe utilizarse mientras corre o practica patinaje en línea.

¡ATENCIÓN! El asiento no debe utilizarse como silla de coche en vehículos a motor.

¡ATENCIÓN! Lea atentamente este manual antes del primer uso del cochecito, y guárdelo para posteriores consultas. La seguridad del niño puede estar en peligro en caso de no se seguir las instrucciones y advertencias de seguridad mencionadas en el manual de instrucciones.

El cuidador debe estar familiarizado con las instrucciones de este manual.

Debe ser solicitado asesoramiento médico profesional sobre la idoneidad de este producto antes de utilizar éste producto.

Asegúrese siempre, antes de ponerlo en marcha, que el niño está cómodo, y que la ropa y mantas etc., estén bien colocados, para que no caigan sobre las ruedas.

El cochecito no debe usarse como asiento de coche durante un viaje en automóvil o autobús.

Asegúrese de que el niño no obstruye ninguna de las partes móviles antes de realizar ajustes para evitar cualquier lesión.

Asegúrese que el asiento y el respaldo están bien acoplados para evitar movimientos repentinos incontrolados.

No permita que el niño suba y baje solo del cochecito.

Aplicar siempre los frenos de estacionamiento al subir y bajar el niño del cochecito.

Asegúrese que las fijaciones, la barra de seguridad y otro equipamiento son colocados y ajustados correctamente.

No levantarse de pié sobre el reposapiés.

Los frenos deben accionarse siempre que el cochecito no esté en movimiento.

Aprender el funcionamiento siempre con el cochecito vacío.

El cochecito no está diseñado para ser utilizado en escaleras.

El cuidador debe tomar precauciones contra el peligro de incendio. En edificios, compruebe la ubicación de las salidas de emergencia y asegúrese que ha comprendido el funcionamiento.

No permita que los niños jueguen o se cuelguen del cochecito.

Durante la conducción preste especial atención, para evitar cualquier situación o colisiones peligrosas.

No sobrecargue el cochecito. La sobrecarga del chasis, asiento, bolsa o cesta provoca una reducción de la estabilidad del cochecito.

Preste especial atención cuando manipule el cochecito para no lastimarse ni usted ni el niño.

Si es posible, siempre utilice rampas o elevadores para superar cualquier obstáculo de acceso.

Siempre levante el cochecito entre dos personas.

Nunca transporte el cochecito cuando usted y/o el ayudante no estén seguros de poder garantizar la seguridad del niño.

Al conducir el cochecito por la carretera, siga todas las normas de tráfico.

No utilice el cochecito para ningún otro propósito que no sea para el que está diseñado.

El cochecito está diseñado para transportar a un solo niño.

No utilice ningún otro accesorio que no sean los originales de Patron diseñados para este producto.

Al plegar y desplegar el cochecito, las instrucciones de uso deben seguirse al pie de la letra, para evitar que cualquier daño en el montaje pueda afectar a la estabilidad del producto.

En el caso de un defecto aparente, que limite la seguridad del producto (p. ej. daño en el chasis, partes que se caen o otros defectos visibles, roturas, etc.) es necesario dejar de usar el producto inmediatamente y contactar su distribuidor oficial local o centro de servicio.

La empresa PATRON no se hace responsable de los daños causados por el uso de otros accesorios que no son los originales de PATRON suministrados por ésta empresa.

La empresa PATRON no se hace responsable de los daños y accidentes causados por un uso inadecuado de este producto.

INSTRUCCIONES DE USO

1) Desplegar y ajustar el cochecito:

Desplegar el cochecito:

Poner el cochecito plegado en el suelo.

Para montar las ruedas giratorias delanteras, insértelas y empújelas en el eje hasta que escuche un "clic" que indica que la rueda está bloqueada.

Para montar las ruedas traseras: inserte cada eje de la rueda en la moldura y presione hasta que escuche un "clic" que indica que la rueda está bloqueada.

Libere el seguro para el transporte (elemento 18). Abra el cochecito y colóquelo en posición vertical (imagen 10a). Sitúese entre las ruedas traseras del cochecito y, con el pie, presione el pedal (imagen 9b) para desplegarlo hasta que escuche un "clic", que indica que está completamente abierto y bloqueado. A continuación, tire de la empuñadura hacia arriba (imagen 8) hasta que escuche un "clic".

Colocar el reposapiés - Coloque el reposapiés en el soporte de ambos lados de la parte delantera del chasis y presiónelo hasta que escuche un "clic". Apriete el reposapiés para asegurarse de que esté bien instalado.

Plegar el cochecito:

Accione el freno de estacionamiento.

Para quitar el reposapiés: retire el reposapiés presionando los botones en ambos lados de la parte delantera del chasis (imagen 6).

Desbloquee el respaldo (imagen 7) y reclínelo a la posición vertical. Presione el botón de la empuñadura y tírelo hacia abajo (imagen 8). Tire de la palanca plegable hacia arriba (imagen 9a). Empuje el cochecito hacia abajo. Asegúrese de que la parte inferior esté plegada mediante el seguro de transporte (imagen 18).

Para quitar las ruedas giratorias delanteras: presione el botón de expulsión de las ruedas delanteras (imagen 5b).

Para quitar las ruedas traseras: presione el botón de liberación de las ruedas traseras (imagen 5a).

Tapicería:

Desembalar el cochecito: se entrega con una funda. Antes del primer uso, es necesario colocar la tapicería en la parte superior del bastidor del chasis. Utilice 4 broches de presión a ambos lados del bastidor del chasis. Presión sobre la cubierta para asegurarse de que esté bien abrochada.

Extracción y colocación de la tapicería: desde la parte superior del chasis, libere la cubierta. A continuación, afloje los cierres de velcro y libere las correas de las hebillas del cinturón de cinco puntos.

Para colocar la tapicería, siga los pasos en orden inverso.

La tapicería del asiento se debe lavar a mano a un máximo de 40 ° C. Ajuste de altura de la placa de pie:

Ajuste de la altura del reposapiés:

Retire el bloqueo del reposapiés en ambos lados de la parte delantera del chasis (imagen 2). Ajuste la altura de la plataforma deslizándola adecuadamente en ambos lados para que los tensores queden casi paralelos al asiento del cochecito. No suba el reposapiés demasiado arriba, podría causar una presión incómoda en las nalgas. Luego bloquéelo. Tire del reposapiés para asegurarse que esté bien abrochado. Escuchará un clic.

Freno de estacionamiento:

Para accionar el freno, presione la palanca de freno de la rueda trasera (imagen 4), tirando hacia adelante. Asegúrese que está bloqueado.

Para desactivar el freno de estacionamiento, levante la palanca de freno.

Bloqueo de la rueda delantera:

Si es necesario, las horquillas de la rueda delantera pueden bloquearse para evitar que se giren.

Las ruedas solo se pueden bloquear en la dirección de desplazamiento.

Presione la palanca de bloqueo hacia abajo para bloquear la rueda (imagen 5c).

Asegúrate, con un ligero tirón en las ruedas, de que ambas estén bien bloqueadas.

Para desbloquear las ruedas, coloque la palanca en su posición superior.

Ajuste de reposapiernas:

Presione los botones que se especifican en la imagen 3, ajústelo al ángulo deseado y suelte el botón.

Presione suavemente sobre el soporte para asegurarse de que esté bien sujeto. Escuchará un clic.

Al levantar el soporte de la pantorrilla, la posición se ajusta sin presionar los botones en los lados externos de la bisagra.

Reclinación del respaldo:

Se puede colocar en 6 posiciones distintas (imagen 1)

Sujete el bloqueo de reclinación del respaldo (imagen 7) e incline el respaldo a la posición deseada.

Vuelve a activar el bloqueo y presione el respaldo hacia abajo para asegurarse que esté asegurado .

Equipamiento estándar

Cinturón de cinco puntos:

Libere los anclajes, coloque al niño en el cochecito y ajuste el cinturón.

Ajuste de la longitud: coloque al niño en el cochecito y ajuste la longitud de la correa deslizando los clips de plástico.

Cesta:

Adjuntar con broches de presión al marco

Equipamiento opcional:



Juego de almohadillas flexibles: almohadillas laterales para ajustar el ancho del asiento

Capota

Reposacabezas ajustable

Saco de invierno

Este producto se puede suministrar opcionalmente con una amplia gama de accesorios de posicionamiento y de fijación.

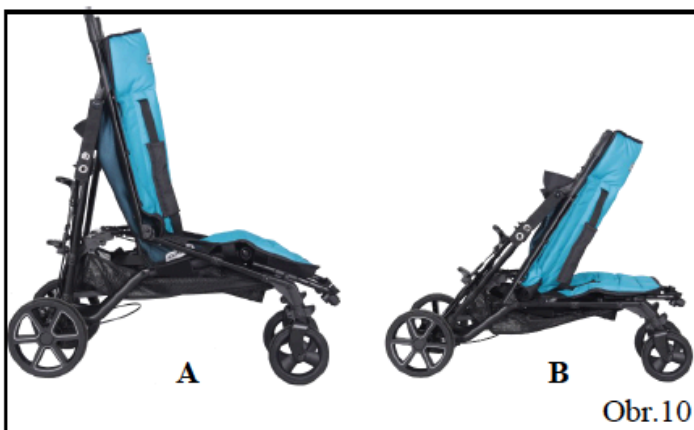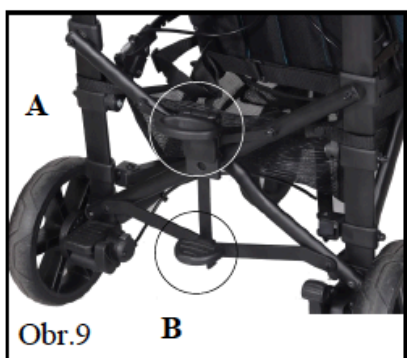

2) Cochechito en marcha:

Entrar en el cochechito:

Asegúrese de que los frenos de estacionamiento estén activados. Para facilitar el acceso, se puede quitar el reposapiés. Si es posible, coloque la parte posterior del cochechito contra una pared u objeto inmóvil (otra persona puede bloquear el cochechito); coloque al niño cuidadosamente en el cochechito, abroche el cinturón de seguridad y ajuste el reposapiés. El niño siempre debe sentirse cómodo.

Salir del cochechito:

Active el freno de estacionamiento. Si es necesario, pida ayuda a una persona de confianza para sujetar el cochechito con firmeza. Si es necesario, para facilitar la salida del usuario ajuste la posición del reposapiés. Quite todos los accesorios de fijación y posicionamiento. Quite la barra de seguridad y saque al niño cuidadosamente del cochechito.

Superando las aceras y los obstáculos bajos:

Bajar – Coloque las ruedas delanteras hacia el borde de la acera. Sujete las empuñaduras con fuerza, mueva el cochechito hacia atrás y mantenga el equilibrio con las ruedas traseras. Coloque las ruedas traseras sobre el borde de la acera, mueva el cochechito poco a poco con ayuda de las ruedas traseras.

Subir – Coloque las ruedas delanteras cerca de la acera. NUNCA choque con las ruedas delanteras con la acera. Sujete las empuñaduras fuertemente, mueva el cochechito hacia atrás y mantenga el equilibrio sobre las ruedas traseras. Conduzca hacia delante y coloque las ruedas delanteras sobre el bordillo. Coloque las ruedas traseras en la parte inferior del borde para iniciar el ascenso.

Transporte manual del cochechito:

Utilice rampas y ascensores cuando disponga de ellos.

Si no queda otra alternativa y no puede evitar las escaleras, debe contar con la ayuda de, como mínimo, una persona de confianza.

No intente subir o bajar solo diversos escalones, a menos que usted y la persona que le ayude estén seguros que controlan totalmente la manipulación.

Descanse a intervalos regulares, si se siente cansado.

Las manos del ocupante deben estar dentro del asiento durante el transporte.

NUNCA levante el cochechito por la barra de seguridad o el reposapiés.

Bajar escaleras:

Sujete la empuñadura con fuerza y coloque el cochechito recto, con las ruedas delanteras en el escalón superior. Mueva la empuñadura hacia abajo y apriete el cochechito hacia delante hasta que las ruedas posteriores se encuentren al final del escalón superior. La persona que ayuda se coloca delante, sujetando la parte delantera del cochechito. Las dos personas deben levantar el cochechito al mismo tiempo. Continúe escalón por escalón hasta el final. (imagen. 15).

Subir escaleras:

Sujete con fuerza la empuñadura y coloque el cochechito recto, con las ruedas traseras contra el último escalón. Sujete la empuñadura hacia atrás y mueva el cochechito hacia delante hasta que las ruedas traseras se encuentren al final del escalón de abajo. La persona que ayuda debe colocarse delante del cochechito y sujetarlo por la parte delantera. Ambas personas deben levantarlo al mismo tiempo. Súbanlo por las escaleras. Continúen escalón por escalón hasta arriba (imagen. 15).

MANTENIMIENTO

El cochechito ha sido diseñado con la mejor calidad y, con un uso y mantenimiento correctos, es capaz de proporcionar años de servicio sin problemas.

Inspeccione regularmente la empuñadura, los mecanismos de seguridad de la barra, los sistemas de cierre, el reposapiés, las fijaciones de las juntas y el cierre de seguridad de la empuñadura para garantizar que estén seguros, limpios y en pleno funcionamiento

Se recomienda que el cochechito sea revisado por un concesionario homologado cada 12 meses.

Si el cochecito está dañado o necesita alguna reparación, diríjase únicamente al distribuidor oficial.

Sólo pueden utilizarse las piezas de recambio de la marca PATRON.

Las piezas rotatorias y móviles del cochecito deben lubricarse regularmente, como mínimo cada seis meses. Nunca use aceite o grasa. Asegúrese de que el lubricante penetre entre los componentes, pero no rocíe demasiado, ya que esto puede favorecer la acumulación de suciedad. Limpie cualquier exceso de aerosol.

El cochecito siempre debe plegarse y desplegarse fácilmente. De lo contrario, lea nuevamente la guía del usuario.

Verifique regularmente la presión de los neumáticos.

Las ruedas, las piezas de plástico y de metal pueden limpiarse con agua caliente y detergente suave.

El tejido del asiento debe lavarse a mano, a una temperatura máxima de 40°C, no utilice secadora.

Nunca limpie con elementos abrasivos, que contengan amoníaco, lejía, ni otros elementos limpiadores que contengan alcohol.

"Después de exponerlo a condiciones de humedad, seque el producto con un paño suave y déjelo completamente extendido al aire libre y en un ambiente cálido. "

Guarde el cochecito en un lugar seco, seguro, a una temperatura recomendada de entre 5 y 20°C.

Apriete los tornillos regularmente.

Recomendamos que después de 24 meses visite un concesionario homologado.

Si hay cables de control usados (frenos, telescopios, inclinación), verifíquelos regularmente y, si es necesario, configúrelos y lubríquelos.

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Empuñadura | 11. Ruedas giratorias delanteras |
| 2. Desbloqueo empuñadura | 12. Ruedas traseras |
| 3. Cinturón de seguridad | 13. Botones para quitar las ruedas traseras |
| 4. Reposapiernas | 14. Palanca de freno |
| 5. Bisagra del reposapiernas | 15. Pedal para desplegar |
| 6. Reposapiés | 16. Agarre para plegar |
| 7. Pasador de bloqueo del reposapiés | 17. Bloqueo de reclinación del respaldo |
| 8. Botones para quitar el reposapiés | 18. Seguridad en el transporte |
| 9. Ruedas delanteras | 19. Respaldo |
| 10. Cerradura giratoria | |

GARANTÍA

Última inspección:

Nombre:

Firma:

Condiciones de garantía:

1. Se aplica una garantía de 24 meses a partir de la fecha de venta. La garantía se aplica para defectos de materiales y fabricación.
2. Contacte con su distribuidor oficial en caso de tener que utilizar la garantía.
3. Para la ejecución de la garantía, el usuario debe presentar el producto adjuntando el comprobante de compra. Conserve la tarjeta de identificación durante todo el período de garantía.
5. El usuario debe seguir las indicaciones recogidas en las instrucciones de uso y utilizar el producto para el propósito para el cual ha sido fabricado. Tanto el fabricante como el distribuidor no son responsables de los defectos causados por un manejo inapropiado del producto.
6. El producto debe ser utilizado, tratado, mantenido y almacenado adecuadamente de acuerdo con las indicaciones mencionadas en las instrucciones de uso.
7. La tramitación de la garantía podrá iniciarse si el producto objeto de la reclamación ha sido enviado completo y dentro de la caja original, cuidadosamente embalado y asegurado contra daños. El propietario está obligado a enviarlo debidamente limpiado. El propietario no puede pedirle al vendedor o al distribuidor que durante el proceso de reclamación realice el mantenimiento básico o la limpieza del producto.
8. Todo defecto debe ser reclamado inmediatamente.
9. La garantía se pierde si los defectos han sido causados por sobrecarga de peso, accidente o violencia, así como intervención o manejo incompetente.
10. El período de garantía no puede intercambiarse con el período de uso, es decir, el período, para el cual, cuando se usa y trata adecuadamente, incluido el mantenimiento, el producto, con respecto a sus características, el propósito dado y la diferencia en la construcción, se puede utilizar adecuadamente.
11. La solución de ingeniería no garantiza los caminos de dirección ideales

NOTAS

PATRON Bohemia a.s. se reserva el derecho de realizar cambios de diseño en cualquiera de sus productos sin previo aviso como parte de su programa de desarrollo continuo