

CUBRE COJIN ANTIDESLIZANTE ONE-WAY


Uso previsto: mantener la posición sentada correcta con el fin de evitar la adopción de una mala postura al deslizarse hacia adelante y la formación de úlceras por presión debido al cizallamiento de la piel.

Como usarlo: coloque el asiento ONE-WAY en la silla de tal forma que la flecha esté dirigida hacia la parte trasera de la silla. Cuando el usuario se ha deslizado hacia delante (Figura A) adoptando una mala postura, el asistente debe recolocarlo usando las diferentes técnicas, dependiendo de las habilidades tanto del usuario como del cuidador. Una técnica muy extendida consiste en inclinar el tronco del usuario hacia delante (Figura B) para modificar los puntos de presión (la espalda del usuario no debe estar pegada al respaldo de la silla). Si el usuario no tiene buen equilibrio se puede usar una almohada para que la sostenga sobre sus piernas y le sirva de apoyo (Figura C). El cuidador puede recolocar al usuario empujándole en las rodillas para que se deslice hacia atrás. Como alternativa un cuidador puede sostener al usuario por delante (Figura D).

Recuerde: ponga el freno para bloquear la silla antes de utilizar el cojín antideslizante.

Para asegurarse que el usuario se siente seguro y que cada movilización manual se hace de manera suave, planifique siempre con antelación la movilización.

Limpieza: el producto debe revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se usa y especialmente después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

 No intente reparar Vd. mismo el producto
No utilice nunca un producto defectuoso

Garantía: dos años por defectos del material o de fabricación, siempre y cuando el producto se haya utilizado correctamente. Antes de proceder al mantenimiento de un producto, lleve a cabo siempre una evaluación de los riesgos.

