



MANUAL DE USUARIO - Sistema de baño Otter



OT 3000



OT 2000



OT 1000



OT 8010



OT8020

ATENCIÓN



Observar instrucciones para uso



Para uso en interiores solamente



Use bajo supervisión de profesionales solamente



No utilice en la superficie en pendiente



No utilizar sobre superficies irregulares

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el sistema Otter de baño y guardarlos para su posterior consulta.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para asegurar un uso seguro y fiable del Otter.


USO

El Otter range es adecuado para niños de 2 años en adelante y que carecen de control del cuerpo por ejemplo, con una sección transversal paraliza, enfermedades neuromusculares central o periférico con debilidades postura corporal, paraliza las extremidades inferiores, afecto por hiperextensión, por ejemplo, con parálisis cerebral.

Reprocesamiento

Este producto es adecuado para el reprocesamiento. Por favor, póngase en contacto con la unidad médica para obtener instrucciones reprocesing, que deben seguirse para la operación segura de la nutria.

Partes del producto

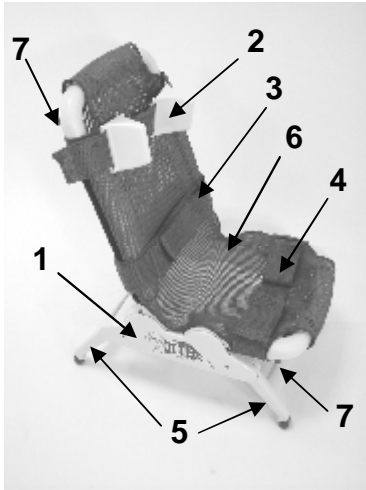



1. Marco
2. Cojines ajustables
3. Cinturón ajustable pecho
4. Cinturón ajustable de piernas
5. Patas ajustables
6. Asiento permeable y lavable
7. Barras de regulación ángulo

Contenidos





El sistema de baño sera entregado completamente armado

Desplegando el marco

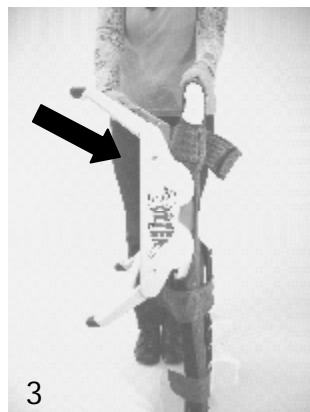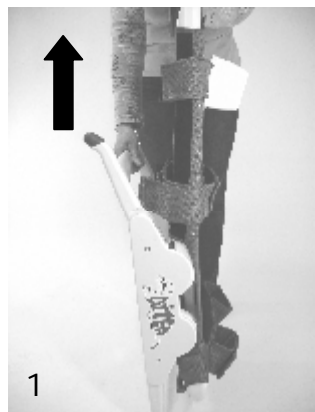



Tire de los pies un poco (1) y el swing hasta el tope fijo (2) a continuación, encaje de nuevo (3) .

Ajuste del asiento y soporte de espalda

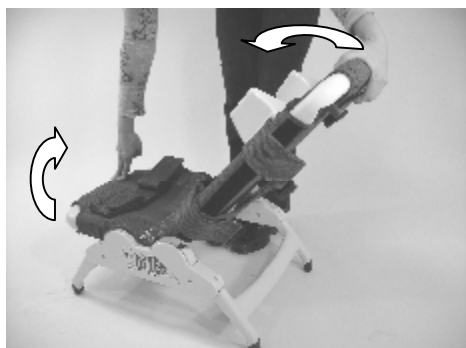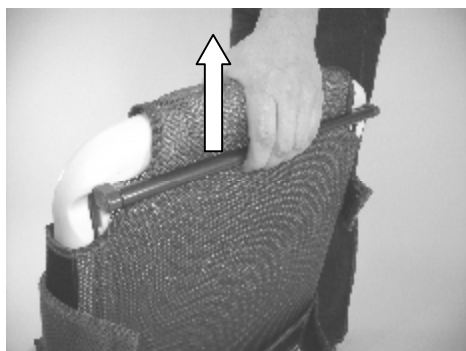

Con el fin de desplazar el asiento o el respaldo tire de la respectiva barra (1) y gire hacia el siguiente punto de bloqueo. (En 4 etapas)

Limpeza y cambio funda del asiento

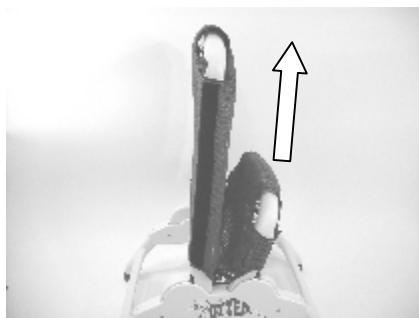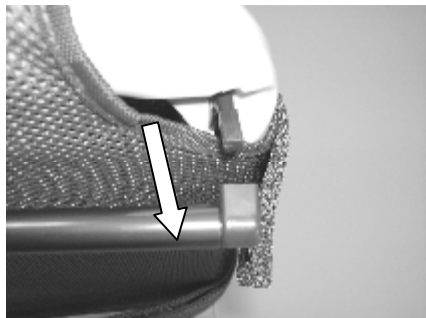


Para cambiar de la tela del asiento debe sacar las barras de Uni como se muestra, a continuación, la tela puede ser despojado del marco y lavar a máquina a 60°C.

Uso de los cojines y cinturón de pecho



Ejemplo

Los cinturones y reposacabezas son individualmente ajustable por cierre de velcro, el apoyo para la cabeza también se puede ajustar fácilmente en anchura desplazando tanto de los puntales secundarios ambos.

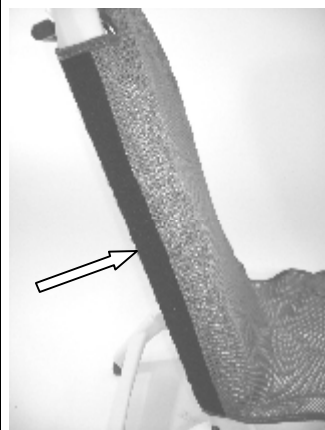

Cinta de Velcro

Instrucciones de seguridad

Solo uso en interiores!
Usar solo en superficies solidas y niveladas

Limpieza/Mantenimiento


Limpiar con regularidad a mano con un paño húmedo La tela y cinturones pueden ser lavados en la lavadora con agua a 60° y detergente liquido! El producto puede ser limpiado con detergente suave y desinfectante

No utilizar ningun detergente fuerte solventes en la superficie de plastico los metales y tornillos deben ser revisados frecuentemente y ser reajustado si es necesario Los puntos de acoplamiento deben ser revisados a fondo. Póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente si no funciona correctamente.

Datos Tecnicos


Talla:	OT 1000	OT 2000	OT 3000
Max. Carga:	30 kg	60 kg	80 kg
Peso:	4 kg	4,5 kg	5 kg
Largo del asiento:	300 mm	350 mm	400 mm
Ancho asiento:	410 mm		
Altura asiento:	140 / 260 mm		
Largo respaldo:	400 mm	560 mm	750 mm
Altura cuerpo:	hasta 90 mm	80 - 130 mm	110 - 170 mm
Material del marco:	plastico		
material tela y cojines	Polyester		
Color de tela:	Verde		



Tipo etiqueta

1 → Kinde rbadeliege – Sist.baño
OTTER " L" 

2 → REF

3 → SN

4 →  (MM/YYYY)

5 →  

Max. B elastung - Max. load: 80 kg

Nur unter Aufsicht von Fachpersonal verwenden !
Use under supervision of expert staff only!

Drive Medical GmbH & Co. KG · 88316 Isny/Allgäu (Germany)

1 - nombre producto

2 - numero de articulo

3 - numero de serial

4 - fecha fabricacion

5 - atencion: ver manual de instruccion

OT 8010 para bañera

Uso recomendado

El soporte de silla de ducha OT 8010 eleva la silla de baño Otter para su utilización en la bañera. Las patas son regulables en altura y la silla de baño Otter se monta fácilmente sobre el soporte. Todos los ajustes se hacen sin herramientas.

Instrucciones de montaje

Su soporte de silla de baño para bañera viene en una caja completamente montado. Si el envío es incompleto, por favor contacte con su distribuidor autorizado.

Mantenimiento

1. Inspeccione periódicamente el soporte de silla de baño en busca de roturas, tornillos flojos, falta de piezas. Si el producto precisa de mantenimiento o piezas de recambio, por favor contacte con un distribuidor autorizado.
2. Mantenga limpio el producto lavándolo con jabón líquido y agua, o con una solución de lejía al 10%

Ajustes (ver Figura 2)

1. Monte la silla sobre la base presionando firmemente hasta que las patas se inserten en las hendiduras a este efecto (A) del soporte de bañera. Para retirar la silla del soporte de bañera, presiones las palancas rojas (B) de una en una y estire la silla hacia arriba.
2. Para ajustar las patas (C), estire de las barras (D) hacia afuera, bascula las patas y empuje hasta que se coloque en la posición deseada.

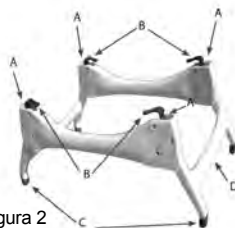


Figura 2

Cuidado

Por seguridad se requiere la supervisión de un adulto en todo momento

OT 8020 Soporte para ducha con ruedas

Uso recomendado

El soporte de silla de ducha OT 8020 eleva la silla de baño Otter para su utilización en la ducha. las tres tallas de silla de baño Otter se pueden montar sobre este soporte de silla, ligero e inoxidable, fabricado en aluminio

Instrucciones de montaje

Paso 1. Inserte los cuatro tapones de plástico (A) en las dos barras de unión del chasis (B) y conecte con ellas las dos partes del chasis por la parte superior del soporte (C) usando los tornillos suministrados. No apriete los tornillos todavía.

NOTA: Todas las palancas rojas deben encarar hacia la parte interior del chasis.

Paso 2. Inserte los cuatro tapones de plástico (A) en las dos patas del chasis (D) y conecte con ellas ambos lados del chasis del soporte usando los tornillos suministrados.

Paso 3. Apriete ahora todos los tornillos.

Mantenimiento


1. Inspeccione periódicamente el soporte de silla de baño en busca de roturas, tornillos flojos, falta de piezas. Si el producto precisa de mantenimiento o piezas de recambio, por favor contacte con un distribuidor autorizado.
2. Mantenga limpio el producto lavándolo con jabón líquido y agua, o con una solución de lejía al 10%

Ajustes

1. Posicione las patas de la silla de baño en su posición más alta y móntela sobre la base presionando firmemente hasta que las patas se inserten en las hendiduras a este efecto (E) que hay en el soporte de ducha. Para retirar la silla del soporte de bañera, presiones las palancas rojas (B) de una en una y estirando de las patas. Estire hacia arriba la silla.
2. Bloquee los frenos de las cuatro patas para inmovilizar el soporte y la silla.

Cuidado

Por seguridad se requiere la supervisión de un adulto en todo momento

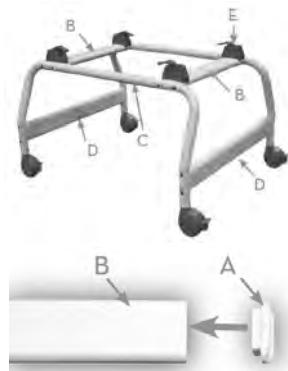

Garantía

La garantía se extiende por 2 años, según Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de fabricación de los productos. Quedan excluidos los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por un uso indebido, así como la falta de mantenimiento. La garantía no cubre modificaciones en el producto, así como el empleo de recambios no originales.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Importador exclusivo:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

