



# Ayudas Dinámicas

## MANUAL DE USUARIO AD 253



## INTRODUCCIÓN

Productos fabricados y diseñados de acuerdo con las más estrictas normas de calidad y seguridad y se ajustan a las directivas europeas (MDD 93/42/EEC).

Es imprescindible observar las siguientes indicaciones de utilización y mantenimiento:

- Antes de cualquier utilización, compruebe que el producto le haya sido entregado en perfecto estado.
- Póngase en contacto con el vendedor si tiene dudas respecto a las limitaciones de uso, al ajuste o al mantenimiento del producto.
- No exceda el peso máximo de usuario o el peso máximo de carga indicado en las especificaciones del producto.
- Procure siempre que el producto se adapte a sus necesidades. En caso de duda, consulte con un profesional de la salud.
- Haga sustituir inmediatamente las piezas gastadas, dañadas o faltantes.
- Compruebe periódicamente la estabilidad y rigidez del producto, y en su caso, el correcto ajuste de los tornillos y el estado de las conteras de goma.
- Es imprescindible prestar mucha atención cuando se utiliza el producto sobre una superficie húmeda.




### APERTURA Y PLEGADO DEL ANDADOR

Cuando utilice el andador este deberá estar siempre completamente abierto y anclado.



- Empuje la pestaña (A) del sistema de plegado hacia abajo para la apertura.
- Tire de la pestaña con el pulgar e índice (A) del sistema de plegado hacia arriba para plegar el andador, teniendo mucho cuidado de no pillarse los otros dedos con la tijera.

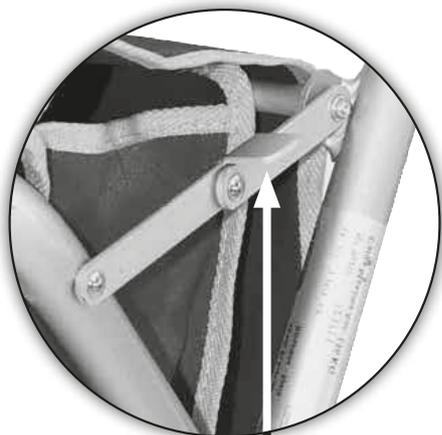

(A)

3 kg  
total

100 kg  
máximo



## AVISO IMPORTANTE de SEGURIDAD



El andador solo se puede utilizar sobre un terreno plano y firme.



Cuando pliegue el andador, tenga especial cuidado en NO colocar los dedos debajo de la "tijera" que pliega el andador ya que podría pillarse los dedos y lastimarse.

## MONTAJE DE LAS EMPUÑADURAS


Retire en su caso los tapones de los extremos de los tubos laterales.

Monte la empuñadura derecha en el orificio derecho y la empuñadura izquierda en el orificio izquierdo, con las partes hacia el interior y la parte ondulada donde se ubicarán los dedos de la mano en el exterior.

## AJUSTAR A LA ALTURA CORRECTA

Utilice los pomos (B) para fijar los tubos a la altura correcta. Saque completamente el tornillo, regule los tubos a la altura deseada y vuelva a insertar el tornillo por el orificio fijándolos con los pomos (B).

Se debe ajustar de manera que la empuñadura esté a la altura (C) de la muñeca del brazo del usuario en reposo.

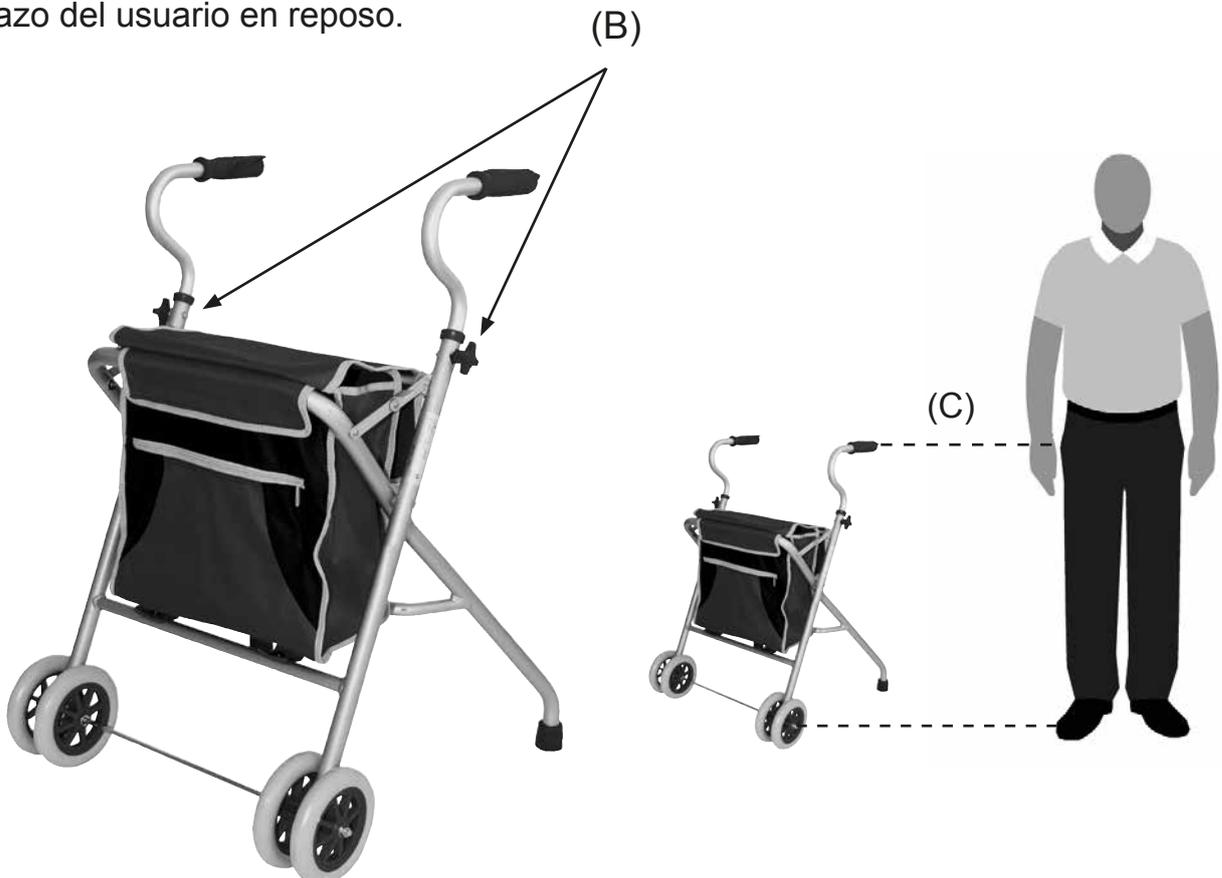

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el caminador AD253, utilice un paño suave humedecido para limpiar el polvo y la suciedad. Utilice agua jabonosa para la suciedad más resistente. Seque con un paño suave.

Compruebe regularmente el estado de las conteras y reemplácelas cuando se desgasten. Conteras de 25 mm de diámetro.

## GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



### Consejo:

Recuerde que por sus características, este andador está recomendado para su uso en interiores. Los andadores para deambular por exteriores se recomienda tengan ruedas delanteras y traseras, las traseras con freno, y preferiblemente con asiento para realizar pausas.



Importado por:  
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.  
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
info@ayudasdinamicas.com  
www.ayudasdinamicas.com

