



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Grúa de bipedestación, elevación y traslado 'Duo'

AD913

<http://www.ayudasdinamicas.com/grua-de-bipedestacion-o-cambia-panales-elevacion-y-traslado-de-enfermos-duo/>



Descripción

La grúa de bipedestación o cambia pañales, elevación y traslado 'Duo', permite en tan solo 30 segundos, convertir la grúa electrónica convencional en una grúa bipedestación cambia pañales, y todo sin necesidad de herramientas. Nueva equipación electrónica alemana, que permite tener una estación externa de carga con una batería completamente cargada y lista para su uso.

Para convertir la grúa en una cambia pañales solo hay que cambiar una pieza del mástil y colocar la plataforma reposapiés, todo ello sin necesidad de herramientas.

Para convertir la grúa sólo debemos cambiar la pieza del mástil que nos permitirá adaptar un arnés A909 para levantar el paciente por debajo de los brazos. Una plataforma encajada en la parte inferior de la grúa servirá de soporte para los pies y las rodillas.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



36/46
kg
total

150
kg
máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD913
RANGO DE APERTURA	de 62 a 82 cm
FONDO TOTAL	110 cm

Accesorios





Estación de carga

En condiciones de uso intensivo de la grúa, por ejemplo en instituciones o residencias, es muy útil contar con una estación de carga donde tendremos una batería siempre cargada y a punto de ser utilizada y reemplazar la descargada.

Todas nuestras grúas llevan una equipación alemana que permite extraer muy fácilmente la batería de la grúa.


Arnés de bipedestación 'torneo'.

Apropiado solamente para utilizarlo con grúas de verticalización. Adaptable a prácticamente todas las grúas de bipedestación por tracción.

En este arnés se ha tenido especial cuidado en los detalles referentes a la comodidad del paciente incorporando, por ejemplo, un doble acolchado en la parte de las axilas.

Un gran cinturón de ajuste rápido por velcro, da mayor seguridad a las transferencias al sujetar a la persona en todo su perímetro.

NO USAR CON PACIENTES HIPOTÓNICOS

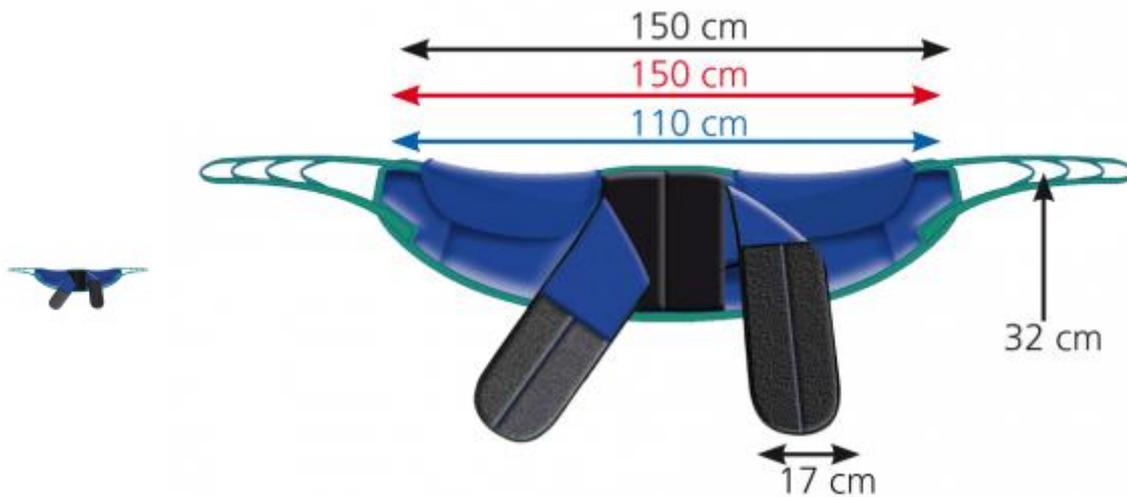

Disponibles en tres tallas		perímetro tórax
A909M	medidas en azul	105 cm
A909L	medidas en rojo	130 cm
A909XL	medidas en negro	150 cm



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés de ajuste rápido 'fast fit'.

Nuevo diseño de arnés de ajuste rápido.

Un arnés seguro y muy fácil de poner, con cinturón frontal de ajuste rápido con velcro.

Este es el arnés preferido en las instituciones, especialmente para usarlo en el WC.

NO USAR CON PACIENTES HIPOTÓNICOS



Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

VER VIDEO AQUÍ






Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés universal 'Confort'.

Para reducir la presión en la parte de las piernas, presentamos el primer arnés acolchado en la parte de las piernas, con espuma termoformada que proporciona mayor comodidad en el paciente y gran resistencia a la abrasión.

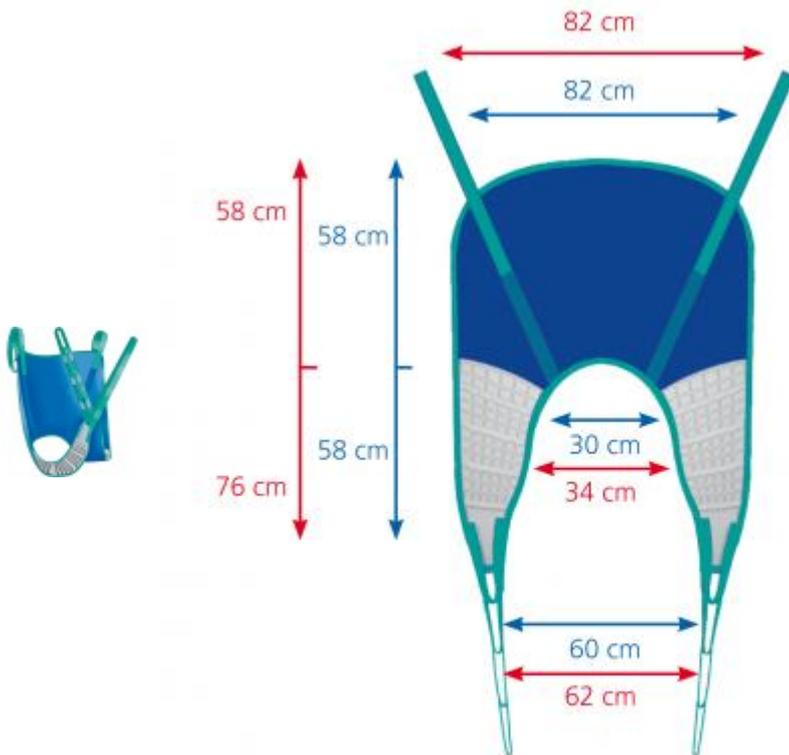

Disponible en dos tallas	
A912M	medidas en azul
A912L	medidas en rojo

VER VIDEO DE LA COLOCACIÓN DEL ARNÉS.

Arnés con cabezal 'confort'.

Para las transferencias más delicadas y para ciertos casos puede ser recomendable utilizar un arnés de montaje rápido con cabezal.

El paciente apoya la cabeza durante la transferencia y además se siente más arropado, dándole mayor sensación de seguridad.




Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

VER VIDEO AQUÍ



Arnés de baño 'aqua'.

Fabricado con tejido de alta tenacidad y gran resistencia que permite un secado rápido. Recomendado para su uso en el baño y en piscinas.

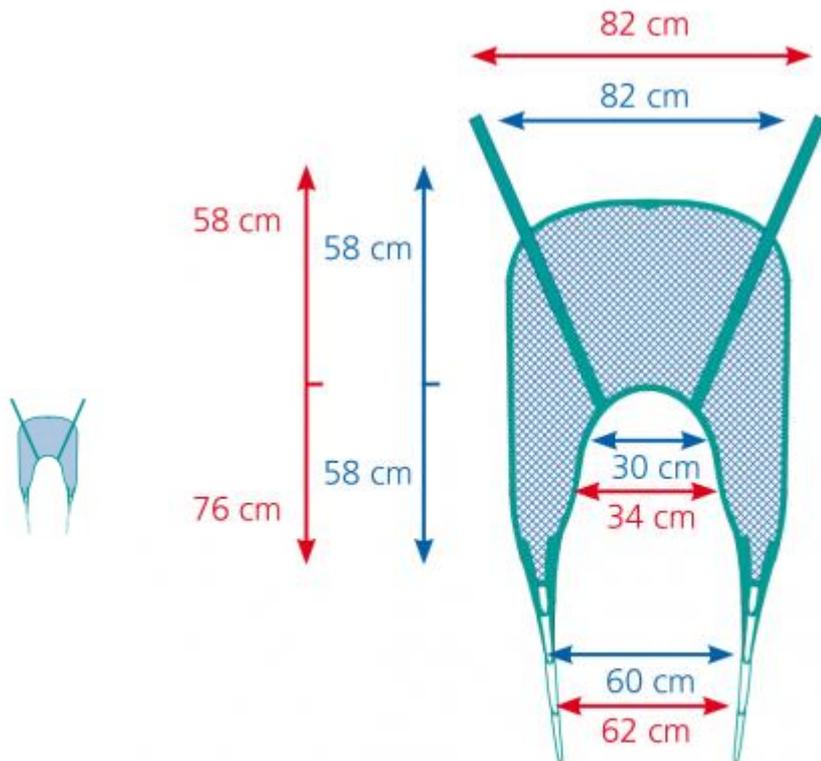

Disponible en dos tallas	
A907M	medidas en azul
A907L	medidas en rojo

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.
VER VIDEO AQUÍ




Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés envolvente.

Su forma envolvente esta concebida para trasladar pacientes inquietos o con ansiedad. El cuidador puede transferir al paciente sentado o recostado.

Talla única.

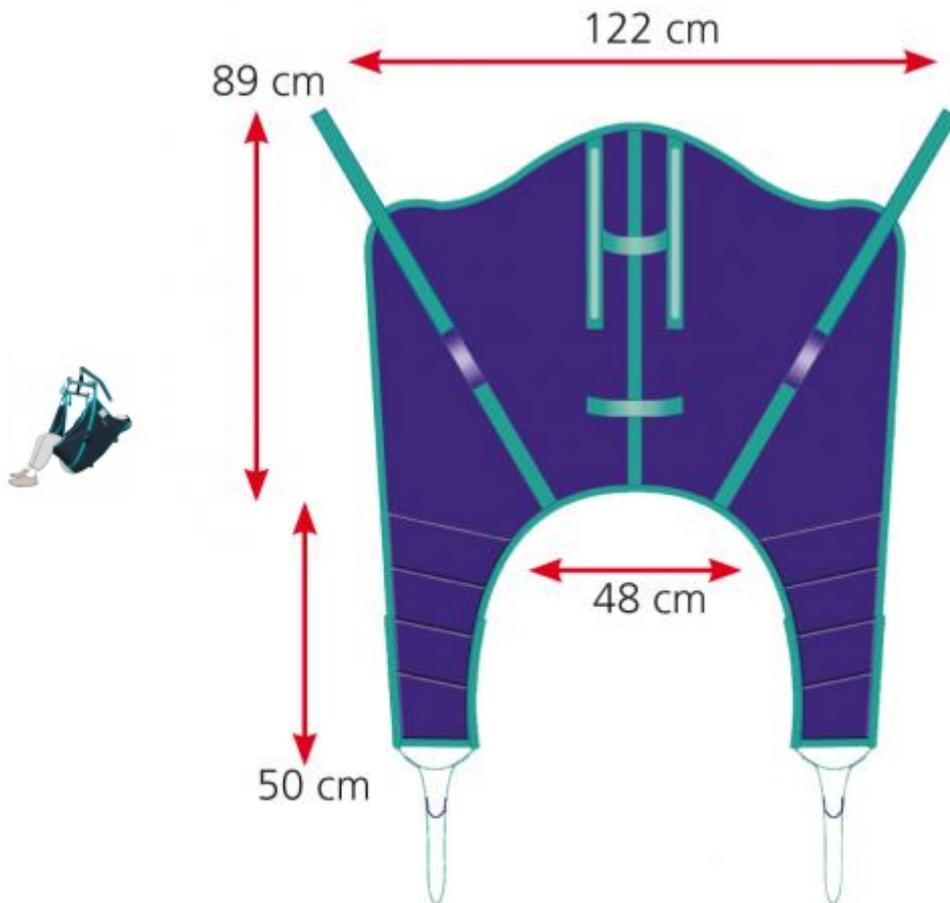

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.
VER VIDEO AQUÍ




AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés de ajuste rápido 'professional'.

De forma envolvente y con un respaldo alto y con cabezal que proporciona un buen soporte a la columna vertebral. Extremadamente fácil de poner a pacientes sentados, por ello es ampliamente utilizado en instituciones.

Talla única.

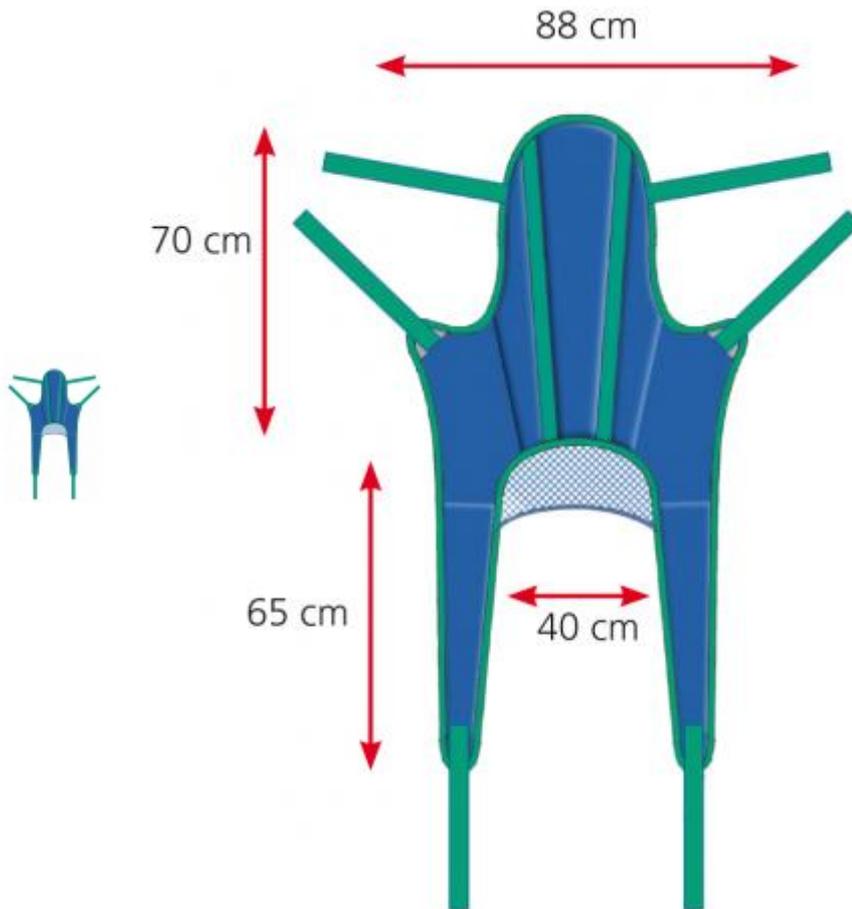

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

VER VIDEO AQUÍ



Ayudas Dinámicas®


Productos para una mayor independencia

Arnés 'amputados'.

Recomendado para post operados de cadera y para amputados de miembros inferiores.

Concebido para las transferencias más delicadas. Su forma envolvente, sin constricciones en las caderas, posibilita las transferencias más difíciles tales como complicaciones en post operados de cadera o amputados.

Talla única.

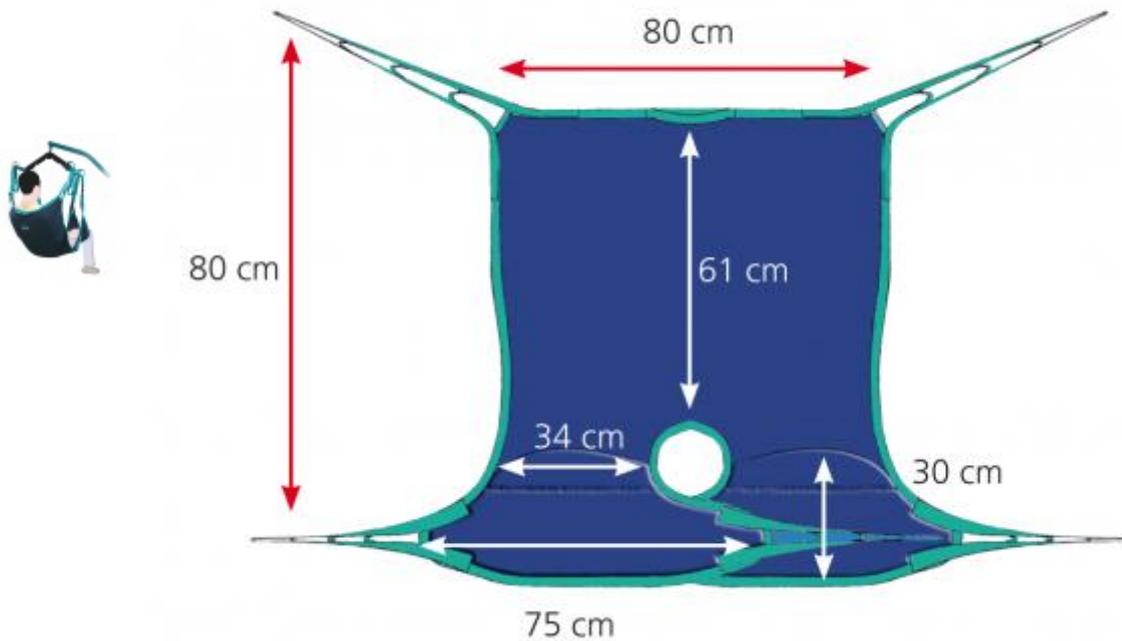




Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Arnés 'goliath' 250 kg.

Arnés especialmente reforzado para realizar las transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y comodidad tanto para el usuario como para el cuidador.

Talla única.

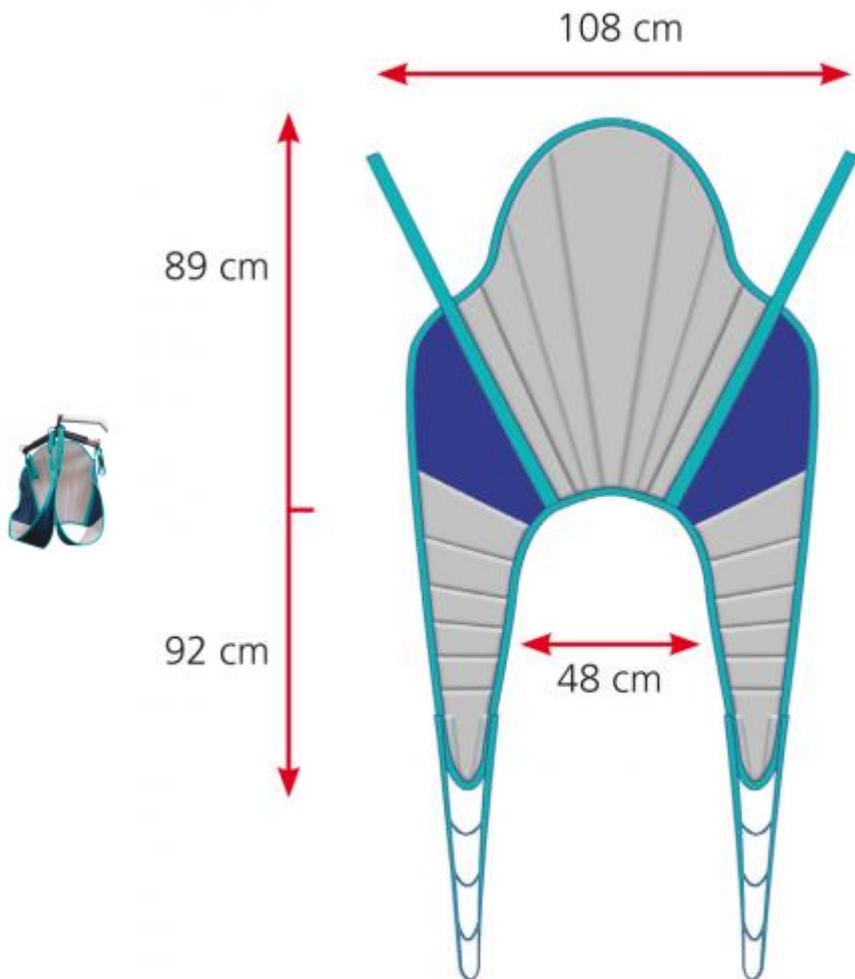

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

[VER VIDEO AQUÍ](#)



Báscula electrónica 'AKS'.

Práctica báscula.

Funciona con 3 pilas AAA y el display avisa cuando la batería está baja.

Desconexión automática con temporizador (4 minutos).

Adaptadores para grúas AKS incluidos.



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Cinta sujeción de piernas para grúas 'Torneo' y 'Duo'

