

## REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

## GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

Importado por:

**Ayudas Tecno Dinámicas S.L.**

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com



**CHAINFEATS ENTERPRISE CO., LTD.**

F8. NO7, SEC 3, Hsin Sheng N. Road. Taipei, Taiwan, R.O.C



**SUNGO EUROPE B.V.**

Olympisch Stadion 24, 1076DE. Amsterdam, Netherlands




# Ayudas Dinámicas

## MANUAL DE USUARIO



**ROLLATOR DE ALUMINIO  
ROLER (Ref. AD160)**

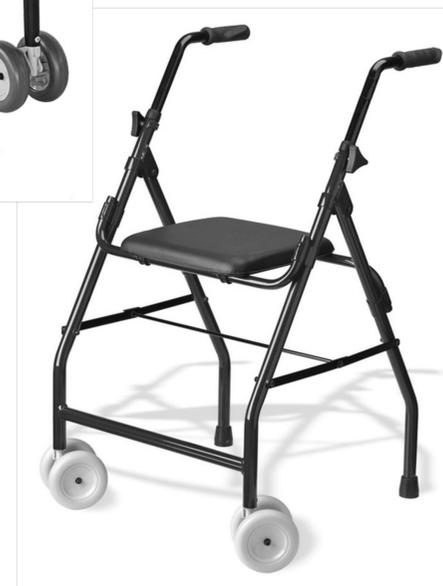

**ANDADOR DE ALUMINIO  
MINI ROLER (Ref. AD140)**

Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, lea detenidamente el manual del usuario.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Ref. AD160** Rollator de aluminio con ruedas delanteras giratorias y traseras con freno por presión para bloquearlas. Incorpora asiento que se puede plegar para su transporte y almacenamiento. Adecuado para su uso tanto en interiores como exteriores.

**Ref. AD140** Caminador de aluminio con ruedas giratorias delanteras y conteras en la parte trasera. Incorpora asiento plegable.

### USO PREVISTO

El rollator está diseñado para servir de apoyo a una persona mientras camina y también como asiento para descansar.

El peso máximo del usuario es de 100 kg y está especificado en la etiqueta del producto.

### Indicaciones de uso


El producto está diseñado para servir de apoyo y ayudar a las personas con movilidad reducida, con deterioro de la fuerza muscular y/o problemas de equilibrio, que necesiten apoyo adicional mientras caminan.

La capacidad cognitiva y la movilidad del usuario deben ser suficientes para un uso seguro.

### Contraindicaciones

El producto no está diseñado para que lo utilicen personas con problemas graves de equilibrio o alteraciones perceptivas funcionales.

### ETIQUETAS Y SÍMBOLOS DEL PRODUCTO

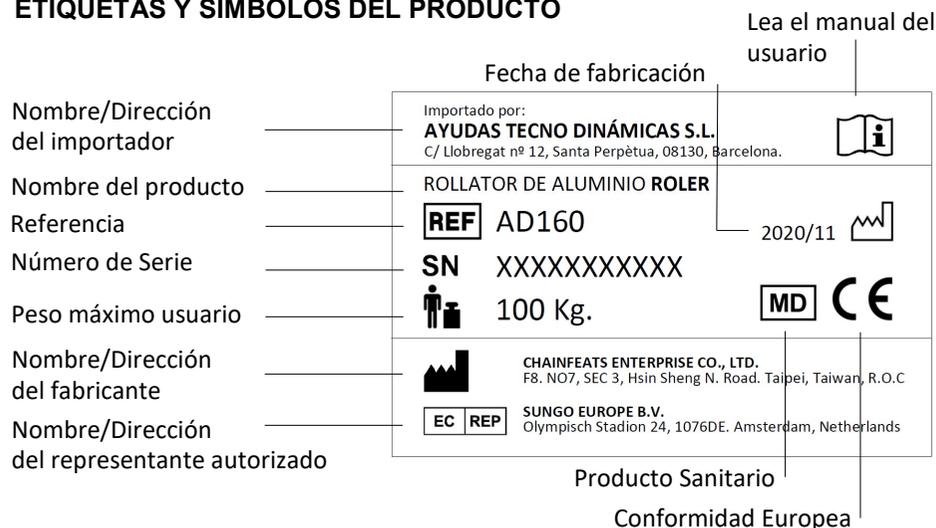

### LIMPIEZA

Seguir métodos erróneos o utilizar líquidos de limpieza incorrectos puede dañar o deteriorar el producto.

-Todos los productos de limpieza y desinfectantes empleados deben ser eficaces, compatibles entre sí y deben ser compatibles con los materiales que se van a limpiar.

-Nunca utilice líquidos corrosivos (álcalis, ácidos, etc.) ni productos de limpieza abrasivos.

Recomendamos usar un producto de limpieza doméstico normal, como líquido lavavajillas.

-No utilice disolventes (decapantes de celulosa, acetona, etc.) que cambien la estructura del plástico o disuelvan las etiquetas adheridas.

-Asegúrese siempre de que el producto se ha secado por completo antes de utilizarlo de nuevo.

### MANTENIMIENTO

Para garantizar un funcionamiento y una seguridad óptimos, inspeccione el producto periódicamente.

-Compruebe que todos los tornillos y ajustes estén correctamente apretados.

-Asegúrese que las empuñaduras estén apretadas y no presentan holguras.

-Compruebe el correcto funcionamiento de los frenos.

-Inspeccione el chasis y las piezas cargadas por si presentan grietas.

-Compruebe si las ruedas están bien ajustadas, desgastadas o dañadas.

-Asegúrese de que las ruedas están libres de pelos u otro tipo de suciedad.

### ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmante el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

## REGULACIÓN DE ALTURA DE LOS PUÑOS

Introduzca el tubo del puño dentro al chasis del rollator y fíjelo a la altura deseada. Inserte el pomo en el agujero exterior del chasis y aprete el pomo de plástico. Repita el mismo procedimiento para el segundo puño asegurándose que ambos estén colocados a la misma altura.

**NOTA:** Asegúrese que ambos pomos de regulación de altura estén completamente ajustados y que los puños estén regulados a la misma altura. Compruebe la estabilidad antes de apoyar todo el peso en las empuñaduras.



## MONTAJE DE LA CESTA

La bolsa está diseñada para montarse debajo del asiento. Coloque la cesta con los botones a los tubos horizontales donde se apoya el soporte del asiento.




Riesgo de caída. No sobrecargue la bolsa de almacenamiento.

## MONTAJE DE LAS RUEDAS

Inserte el tubo de las ruedas delanteras en el tubo del chasis. Coloque uno de los tornillos en el agujero que atraviesa los dos tubos, del exterior del chasis hacia el interior. Apriete el pomo situado en el interior del chasis hasta que la pata quede firmemente sujeta.

Repita la misma operación en las ruedas restantes.


Tenga en cuenta que las ruedas trasera son las que incorporan una contera para el frenado del rollator.

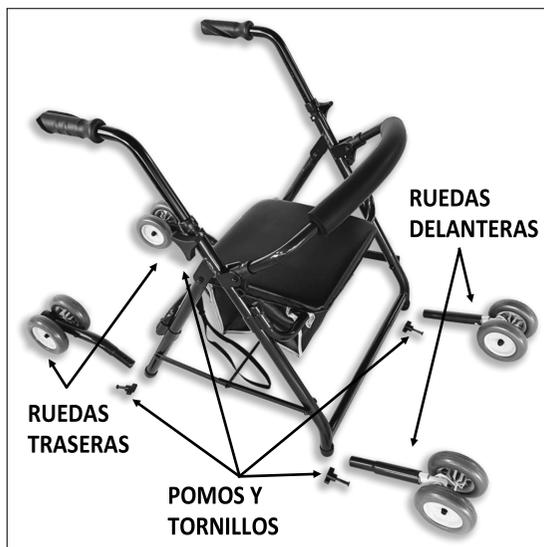

Ruedas delanteras direccionales

## DIMENSIONES Y PESOS

(A) Anchura Total	58 cm
(B) Altura Total	De 82 a 91 cm
(C) Anchura entre puños	44 cm
(D) Altura Asiento	54 cm
Longitud Total	59 cm
Diámetro de ruedas	120 mm
Peso Total	5 kg
Peso Máximo	100 kg

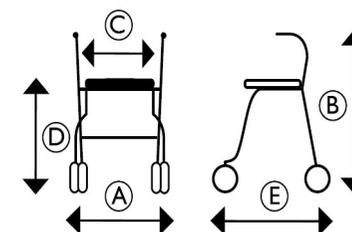

## ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto. No utilice el producto si presenta algún defecto.

Ayudas Tecno Dinámicas da por supuesto que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su nivel de riesgo o sus necesidades terapéuticas. Que el vendedor y cuidadores han determinado que proporcionará la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario. También que un profesional sanitario ha formado adecuadamente al cuidador y al usuario sobre la utilización del producto correctamente y de forma segura.

## VIDA ÚTIL

La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

## INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- No lo utilice en escaleras ni en escaleras mecánicas.
- No se ponga de pie sobre el producto.
- Tenga cuidado al caminar por superficies inclinadas, suelos resbaladizos o superficies irregulares.
- Evite los obstáculos que puede encontrar durante la marcha.
- No permita que los niños jueguen con el producto.
- No utilice el andador para transportar personas.
- Tenga cuidado de que las prendas no queden atascadas entre las ruedas.
- No cuelgue ninguna carga, por ejemplo bolsos, en el chasis, las empuñaduras, etc. del andador.
- Los componentes del producto pueden calentarse si se exponen a temperaturas elevadas (superiores a 41 °C). Tenga cuidado si el producto se expone a altas temperaturas, por ejemplo, a la luz solar directa.
- No guarde el producto en entornos mojados o húmedos.
- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto.
- No utilice el producto si está defectuoso.
- No use el andador para ponerse de pie si está sentado.

## DESPLEGADO

Para desplegar el rollator, presione las empuñaduras (A) para frenarlo y empuje el rollator hacia delante (B), apoyando solamente las ruedas traseras, hasta que se abra por completo.

 Por favor, asegúrese que el rollator esté completamente abierto antes de utilizarlo.

### NOTA:

El asiento tiene que estar apoyado en las dos barras transversales del chasis y la barra de plegado de debajo del asiento totalmente abierta.



## PLEGADO

Para plegar el rollator, abata el asiento hacia delante y tire de la asa de plegado (C) situada dentro de cesta, tal como se muestra en la fotografía.

 Tenga la precaución a la hora de plegarlo de no atraparse los dedos o la mano.



## FRENOS POR PRESIÓN

El andador está equipado con frenos de presión. Para frenar simplemente aplique su peso en las empuñaduras del andador (ver fotografía).

Cuando la persona está sentada, éste queda automáticamente frenado por presión.

 Verifique periódicamente el funcionamiento del freno por presión y el desgaste de las conteras para asegurar su seguridad.

