



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO



**MODELO AUTOPROPULSABLE,
RUEDAS TRASERAS DE 600mm (24")**

**MODELO NO AUTOPROPULSABLE,
RUEDAS TRASERAS DE 305mm. (12")**



SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO APOLO Lite

Este manual del usuario contiene información importante sobre la manipulación del producto. Para garantizar su seguridad al utilizarlo, léalo detenidamente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Silla de ruedas manual y plegable. Reposabrazos abatibles y reposapiés desmontables y regulables en altura. Fabricada en aluminio. Con frenos para el acompañante. Ruedas traseras con sistema de extracción rápida (en versión ruedas de 600mm., autopropulsable). También disponible versión no autopropulsable con ruedas de 305mm.

USO PREVISTO

La silla de ruedas APOLO Lite ha sido diseñada para uso tanto interior como exterior. Puede ser autopropulsada por el paciente o puede ser empujada por otra persona o acompañante.

La APOLO Lite está diseñada para una carga máxima de 130 kg. Esta especificación puede ser confirmada en la etiqueta identificativa del número de serie ubicada en el cuadro/estructura de la silla de ruedas.

Indicaciones de uso

Incapacidad para caminar o severa discapacidad debido a:

Parálisis, pérdida de miembros inferiores, deformidad de miembros inferiores, contractura/daño en articulación (no en ambos brazos) y otras patologías.

Contraindicaciones

El uso de la silla de ruedas es inadecuado en caso de:

Severo desequilibrio, pérdida de ambos miembros superiores, contracturas/daños en articulación de ambos brazos, incapacidad de sentarse o vista inadecuada o dañada.

ETIQUETAS Y SÍMBOLOS DEL PRODUCTO

Lea el Manual de Usuario
Peso Máximo Usuario

	 AyudasDinámicas®	 Ayudas Tecno Dinámicas S.L. Calle Llobregat, 12 08130 Santa Perpètua de Mogoda ES
Descripción del producto	SILLA DE RUEDAS AUTOPROPULSABLE APOLO LITE TALLA 43 CM	
Referencia	REF XXXXXXX	 XXX kg
Número de Serie	SN XXXXXXXX	
Lote	LOT XXX	  YYYY-MM-DD
UDI	 (01)XXXXXXXXXXXXX (10)XXX (11)YYMMDD (21)XXXXXXXXXX	

UDI (Identificador único de Dispositivo) Producto Sanitario Conformidad Europea Fecha de Fabricación

MODELO AUTOPROPULSABLE, RUEDAS TRASERAS DE 600mm (24")



MODELO NO AUTOPROPULSABLE, RUEDAS TRASERAS DE 305mm. (12")

Versión de traslado

La versión de traslado está diseñada para que la guíe exclusivamente el asistente. Para facilitar los traslados laterales y ocupar menos espacio, la silla de ruedas está equipada con ruedas traseras de 305 mm (12").



DIMENSIONES Y PESOS

	APL-41	APL-43	APL-45	APL-48	APL-41T	APL-43T	APL-45T	APL48T
RUEDA TRASERA	600 mm/24" (autopropulsable)				305 mm/12" (no autopropulsable)			
ANCHO TOTAL	61 cm	63 cm	65 cm	68 cm	57 cm	59 cm	61 cm	64 cm
ANCHO ASIENTO	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm	41 cm	43 cm	45 cm	48 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	41 cm							
ALTURA ASIENTO A SUELO	48 cm							
ALTURA RESPALDO	41 cm							
ALTURA REPOSABRAZOS	24 cm							
LONGITUD TOTAL	106 cm				100 cm			
ALTURA TOTAL	91 cm							
DISTANCIA REPOSAPIÉS A	38 a 50 cm							
PESO TOTAL	14 Kg				12 Kg			
PESO MÁXIMO	130 kg							

USANDO LA SILLA DE RUEDAS


SENTARSE Y LEVANTARSE DE LA SILLA

Las distintas incapacidades permiten más o menos maniobrabilidad.

Para evitar que la silla de ruedas se mueva mientras se sienta, puede ser de ayuda colocar ambas ruedas traseras contra la pared.

SENTARSE EN LA SILLA DE RUEDAS

1. Saque los reposapiés.
2. Si es posible, coloque las ruedas traseras contra una pared para evitar cualquier movimiento de la silla y coloque ambos frenos.
4. Sitúese delante de la silla. Luego cuidadosamente vaya hacia atrás hasta que las piernas toquen el asiento.
5. Coja los reposabrazos con las manos y siéntese despacio y con cuidado.
7. Vuelva a poner los reposapiés en su sitio y despliegue las plataformas.

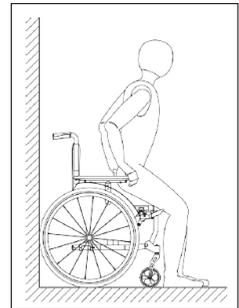

LEVANTARSE DE LA SILLA DE RUEDAS

Lleve a cabo el mismo procedimiento de manera opuesta.

NOTA: Para transferir de lado, debe abatir el reposabrazos del lado que va a realizar la transferencia.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- Antes de su uso, compruebe la funcionalidad general del producto.
- Antes de su uso, compruebe si el producto presenta algún defecto. No utilice el producto si presenta algún defecto.

Ayudas Tecno Dinámicas da por supuesto que un profesional sanitario ha realizado una evaluación individual del usuario para determinar su nivel de riesgo o sus necesidades terapéuticas. Que el vendedor y cuidadores han determinado que proporcionará la ayuda requerida y sus ajustes resultan adecuados para el usuario. También que un profesional sanitario ha formado adecuadamente al cuidador y al usuario sobre la utilización del producto correctamente y de forma segura.

VIDA ÚTIL

La vida útil prevista para este producto es de cinco años, siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos de mantenimiento y se utilice correctamente según lo establecido en este manual. La vida útil real puede variar en función de la frecuencia y la intensidad del uso.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Para evitar caídas y situaciones peligrosas, primero debe practicar el uso de su nueva silla de ruedas en un terreno nivelado y claramente plano. Se recomienda un acompañante.

Por favor, lea todas las advertencias de seguridad:

- Nunca deje a los niños o adolescentes en silla de ruedas sin supervisión.
 - Antes de usar la silla de ruedas, compruebe si todas las piezas instaladas están correctamente aseguradas.
 - Antes de usar la silla de ruedas por primera vez, practique movimientos en un terreno nivelado y claramente dispuesto.
- Familiarizarse intensamente usted mismo con su comportamiento de frenado y aceleración cuando se mueve hacia adelante y en las curvas.
- Siempre bloquee el freno antes de sentarse o levantarse de la silla de ruedas.
 - La silla de ruedas no puede utilizarse para transportar varios individuos o cargas. Está destinado a transportar solo a una persona, sentada en el asiento.
 - Nunca use la silla de ruedas bajo la influencia del alcohol u otras sustancias que influyen en la atención o la receptividad física y mental.

- Tenga en cuenta que el riesgo de vuelco puede aumentar debido a cambios en el equilibrio como resultado del movimiento del cuerpo o la carga de la silla de ruedas.
- Existe un riesgo de vuelco hacia atrás en pendientes de 10 ° o más.
- Los soportes antivuelco deben fijarse en la posición correcta para aumentar la protección contra vuelcos hacia atrás.
- El uso de rampas es esencial para salvar cualquier obstáculo.
- Si no se pueden pasar surcos, rieles u obstáculos similares se deben cruzar en ángulos rectos (90°).
- No empuje su silla de ruedas hacia delante contra bordillos, bordes u otros obstáculos.
- No salte obstáculos (bordillos, bordes, escalones, etc.) sentado en la silla de ruedas.
- No se apoye en las plataformas de los pies mientras se levanta o se sienta.

PREPARANDO LA SILLA DE RUEDAS PARA SU USO

A continuación encontrará notas sobre como desplegar la silla de ruedas y prepararla para su uso. Para empezar, simplemente tiene que desempaquetar la silla, coloque los reposapiés.

PLEGADO/DESPLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

DESPLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

Para desplegar la silla, inclínela levemente hacia un lado. En el lado que está en el suelo, presione el tubo del asiento hacia abajo hasta que encaje en su sitio (2). Puede ser necesario presionar hacia abajo los dos tubos del asiento con las manos para acabar de abrirla por completo.

PLEGADO DE LA SILLA DE RUEDAS

Para plegar la silla, plegue las plataformas del reposapiés o extraiga los reposapiés completos. Tire del tapizado del asiento hacia arriba, cogiéndolo por la parte delantera y trasera (1).



REPOSAPIÉS

Instalación de los reposapiés: Para instalar los reposapiés, alinee y encaje el pivote superior (nº1), en el extremo superior del tubo de la estructura de la silla. La parte inferior del soporte del reposapiés (nº2), debe acercarse y rodear el tubo de la estructura, y el conjunto del reposapiés en ángulo de 45° hacia afuera o hacia adentro. Baje el conjunto y gírelo hasta alinearlo con el chasis y quede bloqueado (escuchará un sonido metálico que le indica que está correctamente bloqueado). Compruebe que los reposapiés quedan completamente sujetos.



Retirar los reposapiés: Antes de retirar los reposapiés, si el usuario está sentado en su silla, active los dos frenos para evitar movimientos imprevistos. Levante y sostenga con cuidado los pies del usuario y tire hacia arriba de la palanca de liberación del reposapiés. El sistema libera el conjunto del reposapiés y podrá entonces girarlo hacia afuera. Cuando está en ángulo de 45° levante el reposapiés y retírelo. Repita esta operación con el otro reposapiés.



 No ponga los pies del usuario en las plataformas hasta que se encuentre correctamente sentado, esto es con la espalda contra el respaldo.

 NUNCA levante la silla sujetándola de los reposapiés. Siempre se debe sujetar la silla del chasis.

Regulación de los reposapiés: Para modificarla, retire la tuerca y el tornillo. Seleccione el orificio deseado y vuelva a colocar el tornillo y la tuerca. Verifique si la altura es correcta y repita la misma operación con el otro reposapiés.




Tornillo y tuerca regulación de altura de los reposapiés.

ABATIR LOS REPOSABRAZOS

Los reposabrazos pueden abatirse hacia atrás para hacer la transferencia a la silla de manera más fácil.


Para abatir el reposabrazos, presione la palanca de bloqueo (1) hacia delante al mismo tiempo que levanta el reposabrazos (2). Para bajar el reposabrazos, abátalo hacia su anclaje (3) y encájelo en él. Asegúrese que queda bien fijado, tirando hacia arriba.

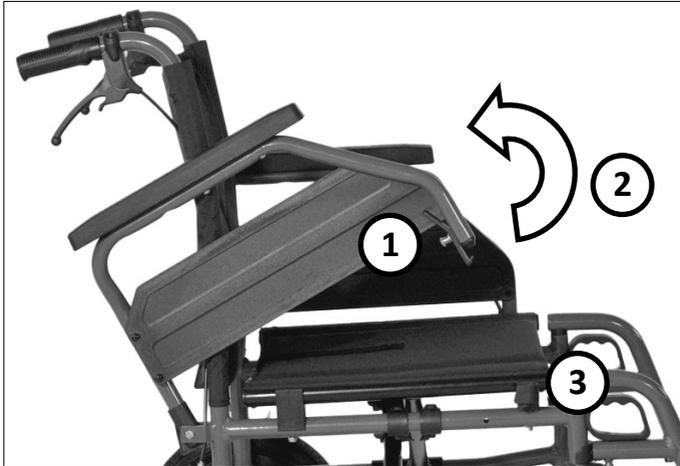

REGULACIÓN DE LOS FRENOS DE BLOQUEO

La distancia entre la zapata del freno y la cubierta de la rueda trasera debe ser de 3-5 mm en el punto más estrecho cuando el mecanismo del freno está completamente abierto (1).

Para ajustar / corregir la distancia, afloje el tornillo (2). Luego regule los frenos a la posición correcta. Ahora vuelva a apretar el tornillo y verifique la función de los frenos. Cuando los frenos están accionados, la silla de ruedas no debe moverse.

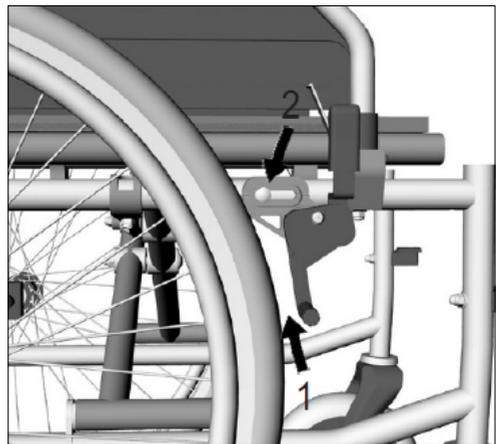



USO DE LOS FRENOS DE BLOQUEO

La silla de ruedas tiene un freno de bloqueo en cada lado. Los frenos permiten al usuario estacionar de manera segura la silla de ruedas.

Solo se deben accionar los frenos cuando la silla está totalmente parada.

Para hacerlo, empuje la palanca hacia adelante (1) hasta que queden sujetos y no retrocedan. Notará que la palanca encaja en su lugar al apretar los frenos (2). La silla de ruedas ahora es estable; Usted se puede trasladarse a otra silla o estacionarla.

Para desbloquear los frenos, simplemente tire de la palanca hacia atrás.

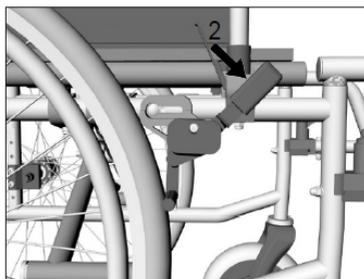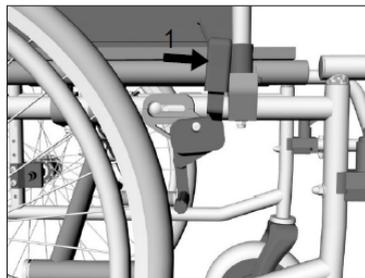


USO DE LOS AROS DE EMPUJE PARA PROPULSARSE Y FRENAR LA SILLA DE RUEDAS. Solo para modelo autopropulsable con ruedas traseras de 600mm.

La silla de ruedas es propulsada y frenada usando los aros.

Durante el primer uso, practique cuidadosamente en terreno a nivel con la ayuda de un acompañante hasta que se acostumbre a su nueva silla. No debería usarla por calles publicas hasta que no tenga suficiente experiencia. Tenga especial cuidado cuando enfrente algún obstáculo.

La silla de ruedas se puede maniobrar hacia delante, hacia atrás y de izquierda a derecha utilizando los aros de empuje de las ruedas traseras. Sostenga el aro con la mano y mueva la rueda hacia adelante o hacia atrás.

Coloque su mano en el aro con el pulgar en la dirección del movimiento y forme un puño con sus dedos en el borde del aro.

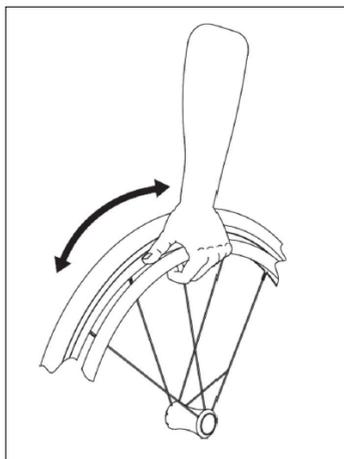

 Al impulsar su silla de ruedas, asegúrese de no tocar la cubierta del neumático con el pulgar.

Para frenar la silla, deje que los aros de empuje se deslicen a través de su mano ejerciendo una presión de una manera controlada.

Para dirigir la silla de ruedas, disminuya la velocidad sobre el aro del lado al que debe moverse o girar la silla de ruedas.

Para girar sobre si mismo, empuje una mano hacia adelante y la otra hacia atrás al mismo tiempo.

 Durante las maniobras de frenado fuerte, los aros pueden calentarse bastante.

MANETAS DE FRENOS:

Las manetas de los frenos situadas en los puños han sido diseñadas para que el acompañante pueda frenar la silla cuando la empuja.

Frenado en marcha:

Dependiendo la presión que ejerza en las manetas, frenará mas o menos según cada necesidad.

Freno de estacionamiento (Parking):

Para bloquear los frenos y que la silla que completamente frenada, simplemente accione las dos manetas y presione los gatillos de bloqueo.

NOTA: Asegúrese que quedan en la posición de bloqueo (parking) antes de levantar o manipular a la persona.



MANTENIMIENTO

Para garantizar un funcionamiento y una seguridad óptimos, inspeccione el producto periódicamente.

-Que los neumáticos no estén dañados. Verifique regularmente la profundidad de la banda de rodadura del neumático una vez al mes.

Esta debe ser de al menos de 1mm. Los neumáticos defectuosos o desgastados deben ser reemplazados.

-La capacidad funcional del sistema de frenos. Debería ser imposible empujar la silla de ruedas cuando se acciona el freno. Si observa un comportamiento de frenado inusual, notifique inmediatamente a su distribuidor especializado y deje de usar la silla de ruedas.

-Que la tapicería del asiento y respaldo esté íntegra y limpia. Si está sucio, se puede limpiar de acuerdo con las instrucciones de limpieza. Si está dañado, póngase en contacto con su distribuidor especializado.

-Que todas las partes móviles funcionen sin problemas y sin ruido. Los ruidos indican daños y deben ser revisados por un vendedor especializado.

-Que todos los tornillos estén apretados y las partes remachadas no estén dañadas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Las partes del chasis de la silla de ruedas se pueden limpiar con un paño húmedo. Se puede usar un agente de limpieza suave en el caso de suciedad más severa.

Las ruedas se pueden limpiar con un cepillo húmedo con cerdas de plástico (¡no utilice un cepillo de alambre!).

El material de tapicería se puede lavar a mano con detergente suave.

ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Desmunte el producto y sus componentes para separar y reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminación y el reciclaje de los productos usados y de sus embalajes debe llevarse a cabo conforme a las normativas legales relativas al tratamiento de residuos vigentes en cada país. Póngase en contacto con su empresa de gestión de residuos local para obtener más información al respecto.

REACONDICIONAMIENTO

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Inspección
- Limpieza y desinfección

Asegúrese de que el manual del usuario se entregue con el producto.

Si se detecta algún daño o un funcionamiento deficiente, no reutilice el producto.

INFORME DE INCIDENTES:

Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este producto en info@ayudasdinamicas.com.

GARANTÍA

La garantía se extiende según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona

Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com

