



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Pinza para papel higiénico 'Torkel'

AD855

<http://www.ayudasdinamicas.com/pinza-para-papel-higienico-torkel/>



## Descripción

Facilita la higiene personal a personas con problemas de agarre o movilidad. Las personas con reuma, por ejemplo, encuentran el Torkel fácil de agarrar y manipular.

Lavable y fácil de limpiar.

1. Corte un trozo de papel de WC (aprox.40 cm). Abra las lengüetas apretando el mango y enganche el papel entre ellas.
2. Enrolle el papel de WC hasta cubrir el extremo de las lengüetas.
3. Ponga las lengüetas entre las piernas y frote.
4. Abra las lengüetas apretando el mango y sacuda el papel para que caiga al WC. Limpie con detergente sin disolvente con un pH de 6 a 9, o con una solución desinfectante al 70%. Si es preciso se puede descontaminar a 85°C.



## Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD855
--------	-------





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

LARGO

33 cm

