



## Gira Pacientes Manual de Usuario


### Introducción

El gira pacientes ayuda al cuidador o asistente a asistir al paciente o usuario para moverse a otro asiento, cama, silla de ruedas, retrete o inodoro, poniéndose de pie y girando.

El dispositivo esta diseñado para transferencias a cortas distancias (por ejemplo moviendo al paciente a la posición requerida en una silla cercana) no esta diseñado para transferencia a largas distancias.



Está diseñado para un paciente individual de hasta 150 kg (24 st) y sólo deberá ser impulsado por un cuidador.

### Descripción de las partes

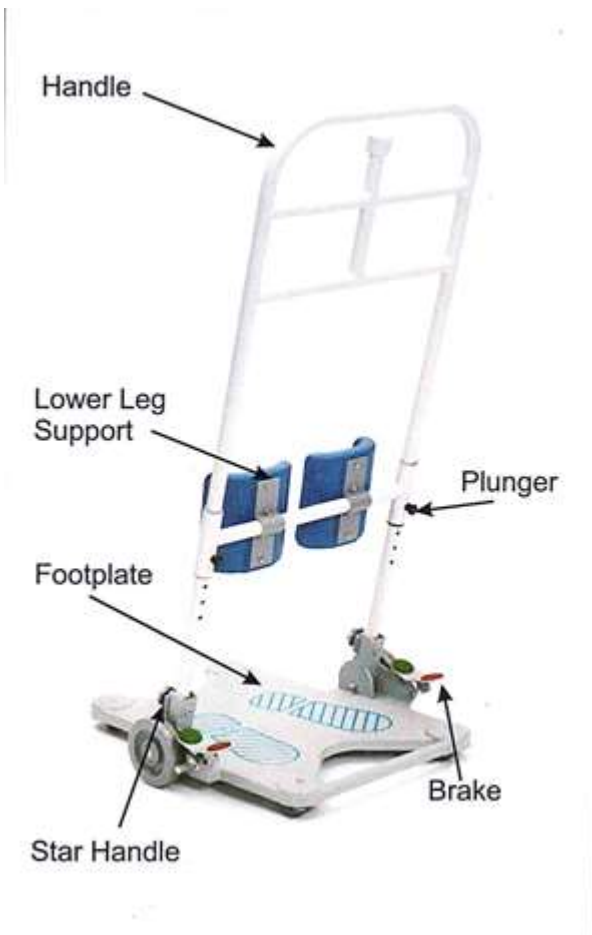

### Ensamblaje

1. Cuidadosamente desempaque todas las partes del Gira Pacientes de la caja. La base se asegura dentro de la caja con ataduras de cable. Use un par de tijeras o pinzas para cortar las ataduras antes de remover.
2. Coloque la base en una superficie nivelada
3. Remueva las dos perillas de estrella de la base girándolas en sentido anti horario
4. Inserte la tubería principal en el zócalo en la base como se muestra por la flecha A en la foto abajo
5. Asegure la tubería principal a la base y gire en sentido horario hasta que las perillas de estrellas estén apretadas (B). Los botones de ajuste de altura en el soporte del soporte de pierna inferior debería estar hacia el cuidador
6. Reposicione los dos soportes de pierna inferior rotándolos de manera que queden del lado del paciente en el gira pacientes (C)

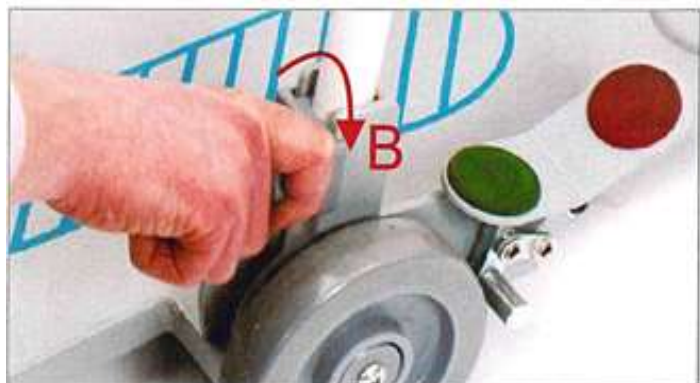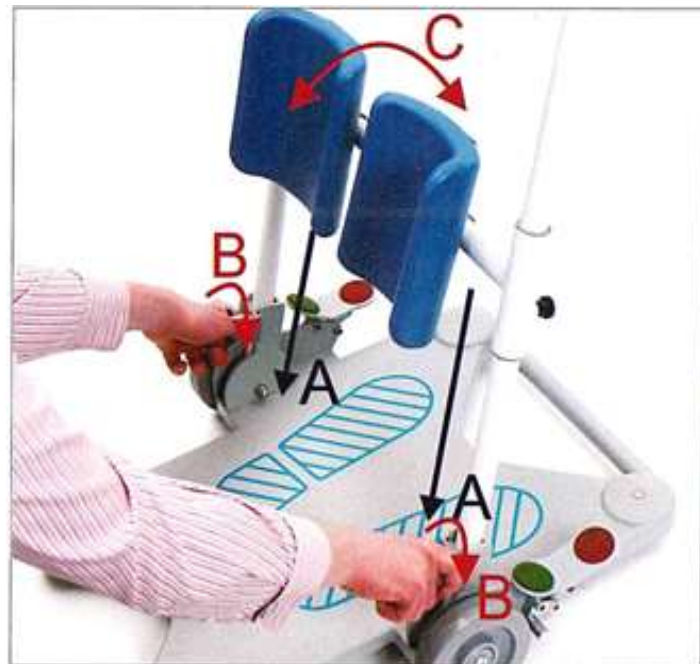


## Ajuste de Altura

El Gira Pacientes incluye dos almohadillas de PU para apoyar a la parte inferior de la pierna de los usuarios, las cuales pueden ser ajustadas en altura para ajustarse a las necesidades individuales del usuario

Para ajustar su altura, jale los dos botones en el soporte de el soporte de pierna inferior y reposicione a la altura requerida (como se muestra abajo). Suelte los dos botones y mueva el soporte hasta que se bloquee en su posición, lo cual puede ser escuchado con un "clic"

El soporte de pierna inferior también puede ser ajustado en Angulo para adaptarse al usuario simplemente inclinando hacia arriba o hacia abajo como se necesite

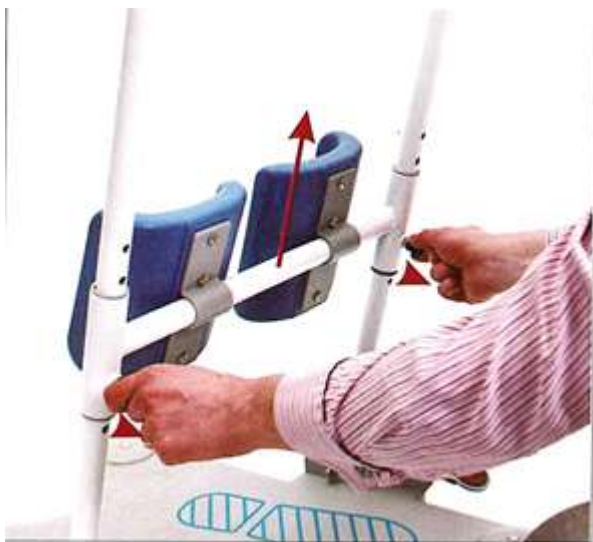

## Usando los Frenos

**Los frenos deben ser activados antes de que el usuario monte o desmonte el Gira Pacientes.**

Para activar los frenos, Pise la almohadilla de goma ROJA como se muestra abajo. Repita para el otro freno



Para liberar los frenos. Presione la almohadilla verde en la palanca del freno hacia adelante como se muestra debajo. Repita para el otro freno



## Moviendo al Paciente

**Los detalles a continuación son sólo sugerencias. Las instrucciones de Desplazamiento y Manipulación sólo no deberán ser dados por su medico. El paciente debe ser capaz de soportar el peso y la evaluación del riesgo de la capacidad del usuario deberá ser hecha antes de la operación.**

**Lea toda la información en este documento antes de su uso.**

El gira paciente ayuda al cuidador o asistente para asistir al paciente o usuario a ponerse de pie y / o moverse a otro asiento, cama o silla de ruedas, al ponerse de pie y girando.

1. Posicione al usuario para que se siente en una silla, silla de ruedas o en el borde de la cama. Si el usuario está sentado en una silla de ruedas, asegúrese de que los frenos se aplican en la silla de ruedas y los reposapiés son removidos o antes de la transferencia.
2. El cuidador debería colocar el dispositivo de modo que el usuario o el cuidador puedan colocar los pies del usuario en los símbolos del pie izquierdo y derecho de la platina el cuidado deberá activar los frenos
3. El cuidador deberá colocar la altura del soporte inferior de la pierna de modo que la almohadilla este justo debajo del las rodillas del usuario. (Ver la sección de ajuste de altura).
4. El cuidador deberá ponerse de pie detrás del dispositivo y hacer de soporte / contrapeso que mientras el usuario utiliza el la manija para mantenerse a sí mismos mientras se paran encima de la paleta, y pasan de una posición sentada a una posición de pie. Por favor vea el siguiente diagrama



5. Una vez que el usuario ha alcanzado una posición de pie con seguridad, el cuidador deberá liberar los frenos y mover el gira pacientes a la posición correcta de manera que el usuario este listo para sentarse en el asiento requerido. El cuidador deberá mover el Gira Pacientes utilizando la manija. El dispositivo debería moverse libremente

**Nota: NO incline ni la palanca del Gira Paciente. Toda la placa debe permanecer en contacto con el suelo en todo momento.**

6. Una vez este cerca del asiento requerido, el usuario deberá tener la espalda al asiento y ser capaz de sentir el borde del asiento cerca de la parte posterior de las piernas.
7. El cuidador deberá activar los frenos y estabilizar el dispositivo. El usuario puede entonces utilizar la tubería de la manija como soporte mientras que se sienta en el nuevo asiento.

### Precauciones de Seguridad

**Las instrucciones de desplazamiento y manipulación sólo deben ser dadas por su medico.**

El paciente debe ser capaz de soportar peso y la evaluación del riesgo de la capacidad del usuario debería ser hecha antes de la operación.

No incline el gira pacientes durante el uso. Todo la placa debe permanecer en contacto con el suelo en todo momento.

La unidad está diseñada para uso en interiores y sólo deberá ser utilizada en una superficie plana.

El dispositivo está diseñado para ayudar a los usuarios a girar y moverse de un asiento a otro. No está diseñado para llevar pacientes o usuarios. Otras soluciones pueden usarse para mover los pacientes.

El cuidador / asistente debe aplicar siempre el contrapeso cuando el usuario está de pie, sentado o de transferencia.

No exceda el límite de peso máximo de 150 kg (24st) .

Los frenos siempre deben activarse cuando el paciente esta estacionario.

Si se utiliza el dispositivo para que el paciente se mueva hacia o desde una silla de ruedas, los frenos de la silla de ruedas siempre debe estar aplicados y el reposapiés retirado.

Garantice que tanto el cuidador y el paciente tengan el calzado adecuado.

No deje al paciente sin supervisión en el dispositivo.


## Mantenimiento

Los marcos requieren una limpieza ocasional con un paño seco y limpio, usando un detergente de propósito general y pH neutro y agua caliente.

Periódicamente revise lo siguiente:

1. Las ruedas estén bien ajustadas, las ruedas funcionen bien, y no hay ningún signo de corrosión, daños o suciedad en los mecanismos.
2. Compruebe que el Gira Paciente gira suavemente y fácilmente. Compruebe que no tenga desgaste excesivo o desgaste en el nylon y la placa base.
3. Verifique que el soporte inferior de la pierna se ajusta sin problemas y de forma segura, y busque signos de desgaste en las dos almohadillas de poliuretano.
4. Asegúrese de que el mango y todos los dispositivos de fijación estén seguros..

## Especificaciones

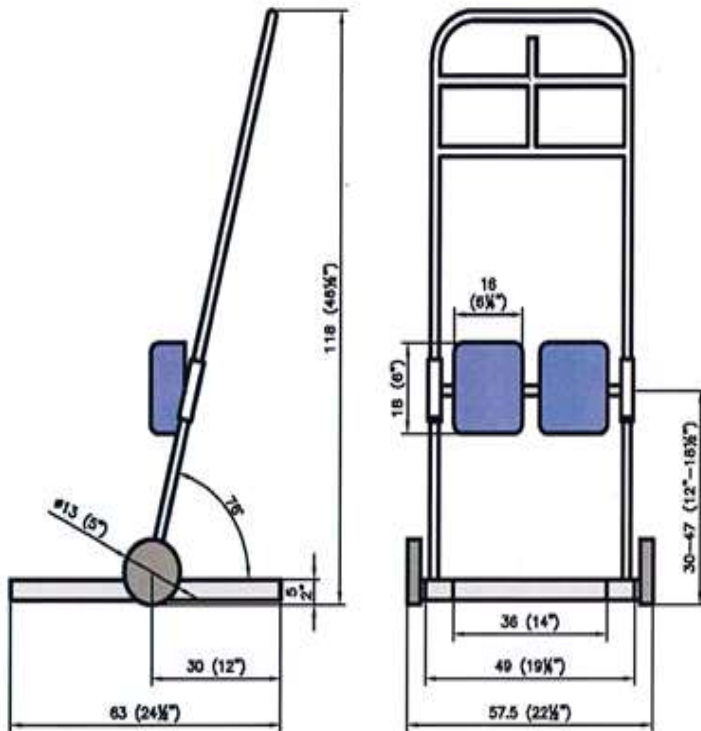

Code: PT001 - Patient Turner  
Overall Dimensions: 63cm (D) x 57.5cm (W) x 118cm (H)  
Packaged dimensions: 117.5cm x 64cm x 17cm  
EAN number: 506026848223  
Packaging: Shipping Carton

## Garantía

El Gira Pacientes viene con una garantía del fabricante de un año para cubrir los defectos de diseño y fabricación.

Esto no incluye daños accidentales, daños como resultado del mal uso y / o desgaste.

Por favor, póngase en contacto con Drive Medical para ver las condiciones completas de la garantía.

Esto no afecta a sus derechos legales.

## Partes de Repuesto disponibles:

Z35101-16:	Rueda Giratoria 34 mm de Diámetro
Z35102-15:	Rueda principal 125 mm de Diámetro
Z35203-16:	Perilla estrella y Soporte
Z35204-16:	Soporte de plástico PU.
Z35205-16:	Almohadilla PU (LLS)
Z35207-16:	Freno Derecho
Z35208-16:	Freno Izquierdo