



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD903



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 3 en 1

1. Saque la silla de la caja.
2. Despliegue la silla y póngala de pie.
3. Ponga los laterales perpendiculares al respaldo.
4. Encare los tetones que hay en los dos extremos de la barra frontal con los encajes que hay en los laterales para encajarlos.
5. Asegúrese que los tetones entran hasta el fondo en los agujeros y que quedan firmemente sujetos.
6. Coloque ahora la barra trasera asegurándose que entra en su alojamiento y queda bien sujeta.
7. Ponga la cubeta y luego fije la tapa en la parte trasera de la silla.

PASO 1



PASO 2



PASO 3



REGULANDO LA ALTURA DE LAS PATAS

1. Antes de usar la silla, regule las patas a la altura que necesite, asegurándose que todas las patas están a la misma altura. El botón de regulación de cada pata debe sobresalir y quedar totalmente bloqueado en el punto deseado.
2. Compruebe que las patas están bloqueadas a la altura deseada, intentando empujarlas o estirarlas sin que se muevan.



PRECAUCIONES ADICIONALES

1. Inspeccione todas las piezas en busca de defectos o daños durante su transporte antes de montar la silla. En el caso de detectar algún fallo, por favor **NO** monte la silla y contacte con su vendedor.
2. **NO** instale ni utilice la silla sin haber leído y comprendido las instrucciones de montaje. Si no ha entendido en su totalidad las instrucciones de montaje, es mejor que, por favor, contacte con el vendedor para que la monte para evitar cualquier riesgo o peligro de caída.
3. Compruebe una vez más que los 4 botones metálicos de regulación de altura, sobresalen totalmente y que lo hacen del mismo orificio equivalente en cada pata.
4. Compruebe que todos los tornillos, tuercas y/o remaches están apretados.
5. Cuando coloque la silla en el suelo, las 4 patas **deben siempre** estar tocando el suelo simultáneamente.
6. Las personas con una limitación de su fuerza física deben utilizar la silla bajo la supervisión o la ayuda de otra persona.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Importado por:

Ayudas Dinámicas

c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA

tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75

info@ayudasdinamicas.com

www.ayudasdinamicas.com

