



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD 545 C



POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA SILLA CLASSIC.

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad más adelante a Vd. o para próximos usuarios.

Esta silla con ruedas para el baño es de construcción robusta con bastidor de aluminio y recubrimiento en epoxi. Incorpora cuatro ruedas de plástico de 125mm Ø, las traseras con freno.

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No utilizar si detecta que está en malas condiciones.
- Asegúrese del estado de las ruedas periódicamente.
- No exceda el peso máximo de usuario o el peso máximo de carga indicado en la etiqueta del producto.
- Si utiliza la silla con la persona completamente desnuda debe colocar una toalla en el asiento.
- Asegúrese que esta silla se adapta a las características y condición física del usuario.
- Es imprescindible prestar mucha atención cuando se utiliza el producto sobre una superficie húmeda.

DATOS TÉCNICOS

Ancho total	56 cm
Alto total	85 cm
Fondo total	62 cm
Ancho asiento	45 cm
Fondo asiento	34 cm
Altura asiento	47 cm
Altura respaldo	40 cm
Peso máximo	120 kg



MONTAJE

Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine la silla en busca de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en contacto con el distribuidor que Vd. ha adquirido el producto.

Instrucciones de montaje

La silla classic viene ya preparada para su uso.

INSTRUCCIONES DE USO

Para utilizar esta silla coloque primero la silla en la ubicación deseada. Una vez colocada accione los frenos de las dos ruedas traseras para evitar que la silla se mueva. Ahora puede utilizar la silla.

MANTENIMIENTO

Debe comprobar periódicamente:

- Compruebe el estado de las cuatro ruedas y los frenos.
- Compruebe que no presenta ningún desperfecto o daño en ninguna de sus partes.

Si detecta algún desperfecto, póngase en contacto con el distribuidor que Vd. ha adquirido el producto.

LIMPEZA

- Limpie regularmente la silla.
- Limpie las ruedas evitando que se acumulen pelos ni suciedad y asegúrese que giren correctamente.
- Para su limpieza, utilice una esponja o un paño húmedo. Emplee un detergente normal.
- Nunca utilice ácidos, alcalinos ni disolventes como la acetona, etc.

La firma AYUDAS TECNO DINAMICAS S.L. se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas que sean en interés de la mejora del producto.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

