



# Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO  
AD520/520LUX



## 1. DESCRIPCIÓN DE LA SILLA

Silla plegable fabricada en aluminio y de altura graduable. Incorpora un dispositivo antiplegado de seguridad. Asiento y respaldo de plástico, de formas redondeadas y sin cantos agresivos. El asiento en forma de U facilita el acceso para la higiene íntima.

## 2. CONTENIDO DE LA CAJA

Compruebe que el contenido de la caja incluye todas las piezas y que éstas se encuentran en buen estado.

1 x asiento de plástico y 1 x estructura de aluminio con respaldo de plástico.

## 3. IMPORTANTE

Lea atentamente estas instrucciones antes de montar y utilizar su silla.

Guarde las instrucciones que podrían serle de utilidad mas adelante o para futuros usuarios.



- Utilice la silla solamente sobre terrenos planos y firmes.
- El peso máximo del usuario es de 100 Kg.
- Antes de sentarse asegúrese que la silla esta bien montada y que los pasadores de seguridad están correctamente colocados.


### Riesgo de accidente!




- Utilice la silla sólo si está en perfectas condiciones.
- Utilice sólo recambios originales.
- No haga ningún cambio estructural en la silla.
- Asegúrese que la silla descansa sobre sus cuatro patas en el suelo de forma segura.

## 4. MONTAJE DE LA SILLA

Desplegar los laterales hacia delante, hasta que las cuatro patas toquen al suelo. Posteriormente coloque el asiento sobre los dos laterales de forma que las orejetas metálicas del asiento coincidan simultáneamente con las ranuras de las piezas de plástico sobre las que descansa el asiento.

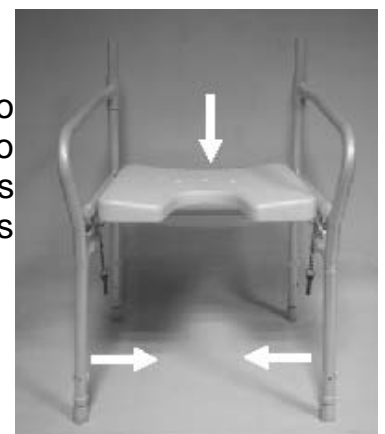

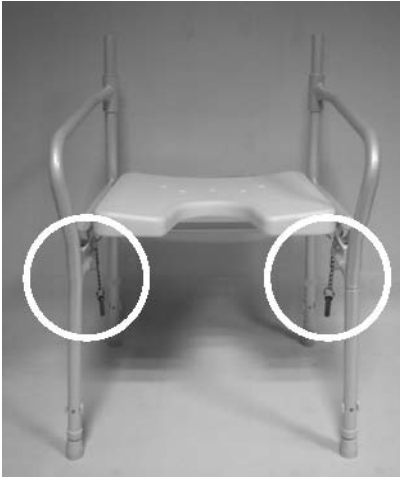


Una vez se ha fijado la estructura del asiento a los laterales, se colocan los pasadores de seguridad por los agujeros situados en las piezas de plástico de sujeción de los laterales, tal y como se muestra en la foto.

De esta manera la silla queda asegurada de forma que no se puede plegar involuntariamente.



Por último, colocar el respaldo presionando firmemente para que se inserte dentro del tubo metálico, por ambos lados, hasta que quede fijado a la estructura de la silla.

## 5. REGULACIÓN DE ALTURA

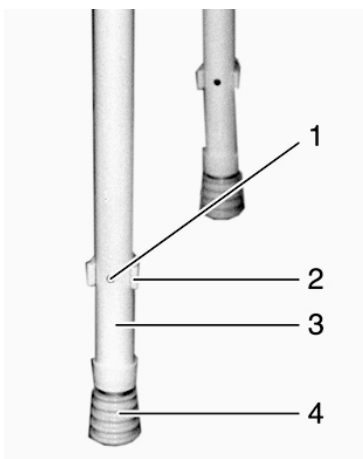

1. Extraiga la pieza (2) curvada de plástico con inserto metálico.

2. Sujete de la contera (4) y extraiga el tubo hasta la altura deseada.

3. Haga coincidir el agujero de la pata interior con el agujero del exterior de la pata (1). Ahora introduzca hasta el fondo el inserto metálico de la pieza (2) que había extraído al principio para dejar la pata asegurada en la posición deseada.

4. Repita la operación con las todas las patas.



Asegúrese que el inserto metálico atraviesa el tubo de la pata, y sobresale por el otro lado, y que está firmemente fijado.

Asegúrese que las cuatro patas están reguladas a la misma altura.

## 6. DESPLEGAR LA SILLA

Quitar los pasadores de seguridad, levantar el asiento hasta que quede liberado de los laterales y dejarlo caer. Desplegar los laterales hacia atrás. No es necesario quitar el asiento de plástico.

## 7. LIMPIEZA

- Usar un trapo húmedo para limpiar, no usar estropajos.
- Usar sólo detergentes suaves, no abrasivos. No utilizar disolventes o detergentes agresivos para limpiar el asiento.
- Lea las instrucciones de los productos de limpieza antes de utilizarlos.

## 8. MANTENIMIENTO

La silla de baño no precisa ningún mantenimiento, sin embargo, se debería comprobar su estado general al menos una vez al mes.

- Observe con atención si alguna parte o pieza presenta alguna deformación, rotura, desgaste o corrosión.
- Compruebe que todas las conexiones (bisagra, tornillos, tuercas, etc.) están en perfecto estado.
- La silla no debe seguir utilizándose si se detecta algún defecto o fallo.

## 9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho total	Altura total	Fondo total	Asiento	Altura asiento – suelo	Peso total	Peso máximo del usuario
53cm	82 a 89cm	55cm	40 x 40cm	46 a 53cm	3,8kg	100kg

## 10. GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por:  
**Ayudas Dinámicas**  
 c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA  
 08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA  
 tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75  
[info@ayudasdinamicas.com](mailto:info@ayudasdinamicas.com)  
[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

