



Ayudas Dinámicas

**MANUAL DE USUARIO
SILLITA EIO**

Eio



Ayudas Dinámicas

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. INFORMACIÓN	4
3. INSTRUCCIONES Y PARTES	6
4. LIMPIEZA	14
5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO	15
6. GARANTÍA	16

1. INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por adquirir su nueva silla de paseo EIO de Ayudas Dinámicas®.

Nos complace proporcionarle productos seguros y confortables. Nuestro objetivo es asegurar su completa satisfacción. Esperamos sinceramente que disfruten de su sillita de Ayudas Dinámicas®.

El producto que ha comprado combina la técnica de los componentes de seguridad, confort y estilo.

Por favor, lea cuidadosamente el manual y siga todas las instrucciones de seguridad. Así se asegurará de que usted obtiene el máximo provecho de su respaldo.

Si no se siguen las instrucciones, advertencias y notas de este manual y las indicadas en su producto, podría resultar en lesiones personales y/o daños en el producto y anulará la garantía del producto.

2. INFORMACIÓN



¡ADVERTENCIA!

Evite hacerse daño por caídas o deslizamientos hacia fuera. Siempre use los arneses del asiento. nunca deje al niño desatendido. importante: guarde estas instrucciones para futuras consultas. la seguridad de un niño es su responsabilidad. este vehículo es conveniente para un niño.

-Siga todas las instrucciones cuidadosamente. El uso incorrecto puede causar daños a la silla de paseo.

-Este producto ha sido diseñado para soportar un peso máximo de 90 libras (40 kg).

-Los niños nunca debe dejarse desatendidos.

-IMPORTANTE - Es importante para la seguridad de su hijo que el arnés esté correctamente instalado y ajustado. Si no es ajustado correctamente de acuerdo con las instrucciones, la estabilidad de la silla de paseo se verá comprometida.

-El cinturón arnés y la silla no son un sustituto para la supervisión adecuada del niño sin un responsable.

-El niño debe estar libre de piezas en movimiento mientras le realiza los ajustes.

-IMPORTANTE - PELIGRO: Es importante que se tenga cuidado en asegurarse de que los niños son liberados de la silla de paseo cuando la pliegue o despliegue.

-No lleve más niños, cosas ni accesorios dentro de esta sillita salvo lo permitido según este manual. Pueden causar a la silla de paseo un en estrés innecesario y hacerla inestable o romperse.

-La sobrecarga, el plegado incorrecto y el uso de accesorios, por ejemplo, asientos para niños, ganchos para bolsas, cubiertas de lluvia, etc. que no sean los aprobados por el fabricante puede dañar o romper este cochecito.

-Los daños causados por el uso de accesorios no suministrados por el fabricante no serán cubierto por los términos de nuestra garantía.

-Nunca deje al niño en el cochecito al subir o bajar escaleras o escaleras mecánicas o cuando viaja en otras formas de transporte.

-La silla de paseo siempre debe abrirse y plegarse fácilmente. No la fuerce.

EIO

-Maneje por curvas y superficies irregulares con cuidado. Impactos repetidos pueden causar daños a la silla de paseo.

-Nunca permita que los niños se pongan de pie en el reposapiés.

-No deje el cochecito expuesto a fuentes de calor como radiadores o bajo la luz directa del sol.

-No coloque objetos en la parte superior de la campana, ya que puede causar daños en la misma.

3. INSTRUCCIONES Y PARTES

-Lea estas instrucciones antes de usar y guárdelas para consultas en el futuro.

-Accione los dos frenos al aparcar el cochecito.

-La seguridad de sus hijos pueden ser afectada si no sigue estas instrucciones.

PARTES



1. MARCO

Despliegue el marco del carrito. Después de bloquear los bloqueos primario y secundario escuchará un CLICK.



2. EJE TRASERO

Empuje el marco de atrás hacia el eje trasero. Cuando quede bloqueado escuchará un CLICK.



3. RUEDAS TRASERAS

Empuje las ruedas traseras hacia el eje trasero en ambas partes. Cuando queden bloqueadas escuchará un CLICK.



4. RUEDAS DELANTERAS

Empuje las ruedas delanteras hacia el marco frontal por ambas partes. Lubrique ligeramente con Teflón. Cuando queden bloqueadas escuchará un CLICK.



5. REPOSAPIÉS

Oriente el reposapiés hacia arriba. Empuje los tubos de la izquierda y derecha del reposapiés a la vez hacia el marco. Cuando queden bloqueadas escuchará un CLICK.




6. ASIENTO DE TELA

Hay dos botones en el tubo del manillar (en el lado derecho e izquierdo). Cuando queden bloqueadas escuchará un CLICK.



EIO


- 6.1.
Botones sujetan las correas en la parte trasera.
Cuando queden pulsados escuchará un CLICK.

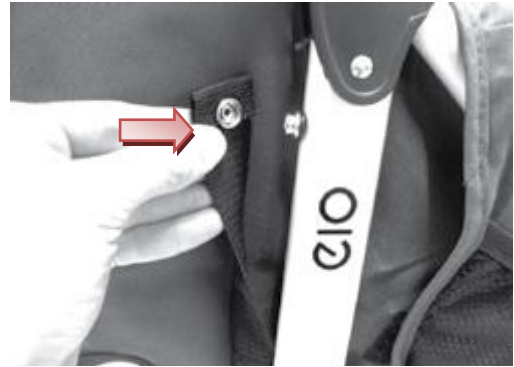

- 6.2.
Dos correas bajo el marco del asiento



- 6.3
Importante: detalles de las correas de debajo del asiento

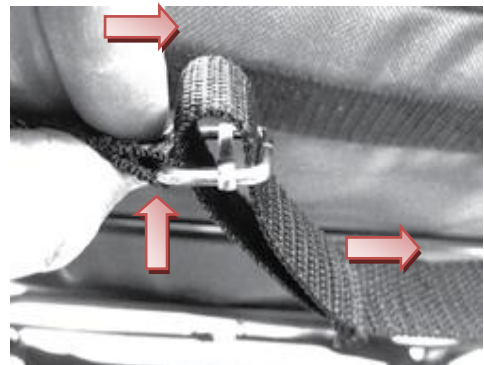


- 6.4
Detalles de las correas de debajo del asiento. La correa restante debe ser escondida entre la correa tensionada y la parte inferior de la silla. No tensione demasiado.



6.5

Dos enganches del reposapiés. Enganche los botones del reposapiés a la tela. Cuando queden enganchados escuchará un CLICK.

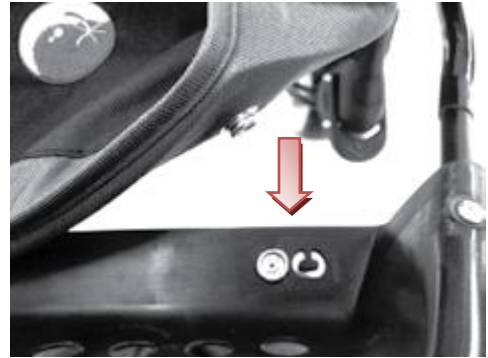

6.6

Dos velcros del reposapiés. Envuelva el velcro alrededor del marco del reposapiés y ajústelo. Repita en ambos lados.



6.7

Pliegue el velcro y accione el bloqueo primario. Repita en ambos lados.




7.CAMPANA/TOLDO

A. Deslice el toldo hacia abajo al conector del bastidor/marco. No lo fuerce.

Asegúrese de que está libre de obstrucciones de tela. Repita el procedimiento para la izquierda. Cuando el bloqueo esté activado, un CLIC audible será escuchado.

B. Para extraer el toldo, presione hacia abajo y luego hacia arriba.

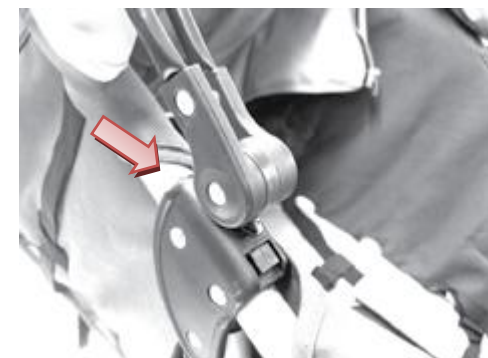


7.1

Fije la campana/toldo y cierre con la cremallera los lados.


La cremallera y el broche de presión deben ser posicionados justo debajo del botón de ajuste. Repita el procedimiento en ambos lados.

NOTA: Se puede quitar la parte trasera de la cubierta abriendo la cremallera central.

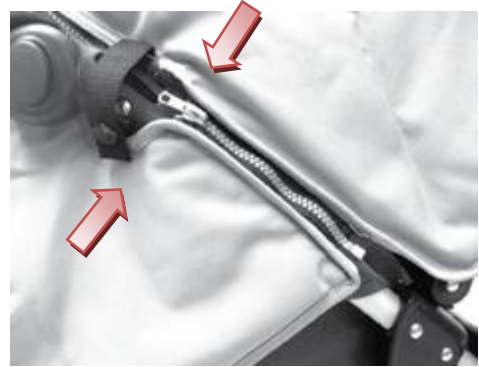

8. CUATRO ALMOHADILLAS LATERALES

Pase ambas correas de velcro a través de los agujeros localizados en las esquinas del asiento y del respaldo

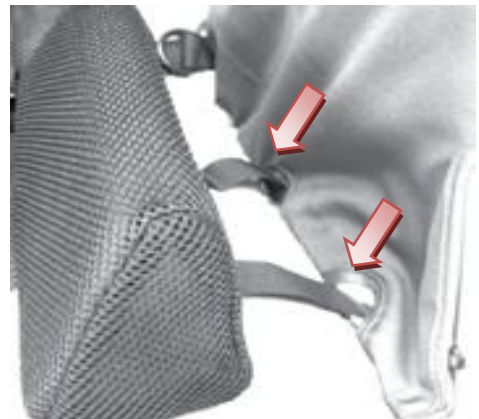

8.1

Tire de las correas de velcro hacia afuera del asiento. Luego envuelva el marco/bastidor y ajústelas. Repita en ambos lados.



9. ARNÉS/CINTURÓN DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!


Evite lesiones por caídas o deslizamientos de la sillita. Siempre use la correa de la entrepierna en combinación con el cinturón de cintura y hombros.

Para ajustar el arnés

A. Inserte ambos cinturones en la clavija


B. Ajuste la longitud de los cinturones.

El cinturón de entrepierna y hombros deberían quedar ajustados

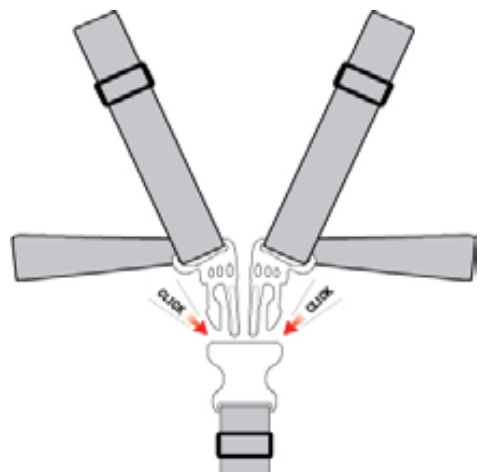

Para liberar el arnés

C. Suelte la clavija y tire de los cinturones

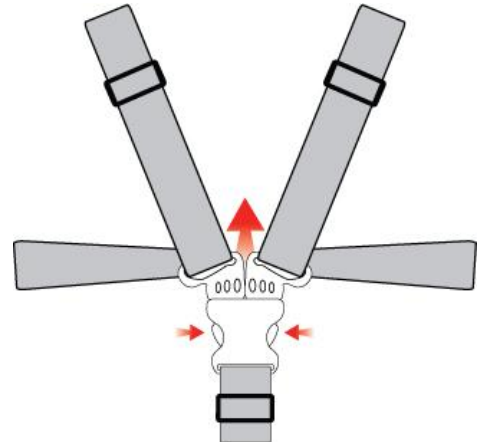

10. ARNÉS DE HOMBROS (niños pequeños)

Si usted tiene un niño pequeño, un método opcional para enhebrar el arnés de hombros puede ser necesario para tomar más holgura. Pase la correa a través de la parte frontal inferior y ranuras luego pásela por las ranuras superiores. Coloque una almohada sobre las hebillas a fin de evitar rozaduras.



11. FRENO DE APARCAMIENTO


Usando el pie, tire para liberar el freno y presione para activarlo.



12. CORREA DE RECLINACIÓN

ARRIBA: Empuje hacia arriba la hebilla de reclinación hebilla y tire hacia abajo de la correa.

ABAJO: Tire hacia abajo.

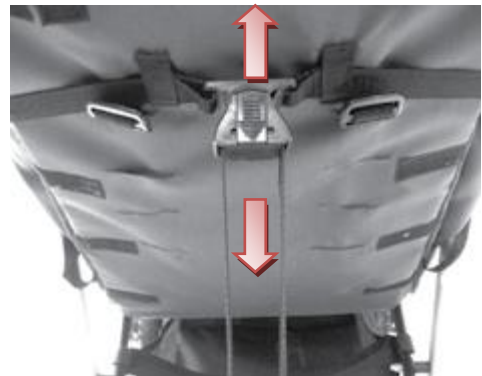

13. ÁNGULO DEL REPOSAPIÉS

Para ajustar el ángulo del reposapiés, presione el botón en ambos lados simultáneamente. Usted escuchará un CLICK cuando quede bloqueado.



14. BLOQUEO DEL GIRO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Para bloquear el giro de las ruedas delanteras, pulse la pestaña hacia abajo para bloquear y hacia arriba para desbloquear. Repita el procedimiento para la izquierda.

Un clic audible será escuchado cuando el bloqueo esté activado.

NOTA: Para bloquear las ruedas estas deben de estar posicionadas hacia adelante.



15. PLEGADO

- A. Recline totalmente la silla de paseo
- B. Desacople el capó trasero de la parte posterior del asiento.
- C. Desbloquee el giro de las ruedas delanteras (ambos lados).
- D. Coloque el reposapiés en posición hacia abajo.
- E. Colóquese detrás de la silla de empuje, levante los bloqueos o cierres primarios (ambos lados) y bloqueos secundarios (lado derecho).



EIO

15.1

- A. Desbloquee los cierres primarios.
- B. Empuje hacia abajo del manillar de la EIO



15.2

- A. Active el cierre



4. LIMPIEZA

-Limpie la estructura con un paño húmedo y un detergente suave y déjelo secar completamente.

-Si partes del carrito han estado expuestas al agua salada, le recomendamos que se enjuaguen con agua dulce tan pronto como sea posible.

-La capota frótela ligeramente con un paño húmedo y un detergente suave. La funda del asiento, el cojín de cabeza, cojines y almohadillas laterales del arnés tal vez deban ser lavadas de vez en cuando. Seque completamente antes de volver a usarla.

-No pliegue ni almacene el producto mientras esté húmedo y nunca lo guarde en un entorno húmedo, esto puede causar que se aparezca moho.

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios de diseño en cualquiera de sus productos como parte de su diseño continuo programa de mejora.

5. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Este cochecito requiere un mantenimiento regular por parte del usuario. Compruebe regularmente todos los remaches y conexiones para la firmeza y seguridad. Inspeccione todos los frenos, las ruedas y los neumáticos y reemplácelos o repárelos si es necesario.

Compruebe todos los dispositivos de seguridad para su correcto funcionamiento, en particular los seguros primarios y secundarios. Estos deben estar libres para moverse en todo momento. No seguir utilizando un producto que no está en buenas condiciones estructurales.

- Se recomienda revisarla cada 12 meses.

- Si las ruedas rechinan, lubrique ligeramente con teflón o aplique un recubrimiento de silicona. No utilice productos a base de aceite o grasa, ya que esto atrae la suciedad, lo que dificultará el movimiento.

- Sólo las piezas de repuesto del fabricante deben ser utilizadas. Puede que no sea seguro utilizar piezas no suministradas por el fabricante.

6. GARANTÍA

Su cochecito está garantizado de estar libre de defectos de fabricación por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra en condiciones normales de uso y siempre que se use en según el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento. Esta garantía se extiende solamente al comprador original y sólo es válida con el comprobante de compra. Por favor, conserve el comprobante de compra con esta garantía limitada.

En caso de ser necesaria una reparación, por favor póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto.

Tenga en cuenta que la garantía no será aplicable si:

- Un fallo es causado por un mal uso o mal mantenimiento.

- Las reparaciones son realizadas por un tercero.

- La silla de paseo falla debido al desgaste general y ruptura como resultado del uso diario.

- Un cochecito está dañado como resultado de un accidente.



Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

