



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO - AD 540



POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL TABURETE DE BAÑO

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad.

Los taburetes de baño son fáciles de manejar y ofrecen mayor seguridad al paciente.

Indicaciones

El taburete de baño sirve como asiento para la ducha. Está indicado para personas con dificultades para estar de pie.


Advertencias de seguridad / Utilización

- El taburete de baño debe apoyarse de forma segura en las 4 patas. Existe el peligro de resbalar al sentarse o levantarse en duchas húmedas, especialmente cuando utilice jabón.
- Después de cada montaje y desmontaje del taburete controle la estabilidad y compruebe que todas las patas están reguladas a la misma altura.
- No se incline demasiado hacia delante o hacia atrás.
- Asegúrese después de cada uso, que el taburete está fijo y seguro en la ducha.


Entrega


El taburete se entrega en una caja de cartón. 1 x asiento. 4 x patas (telescopicas)

Montaje

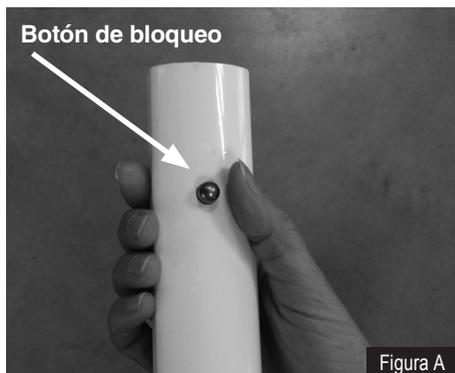

1. Presione los botones de bloqueo (Figura A) e inserte las patas al asiento por el extremo opuesto a las conteras.

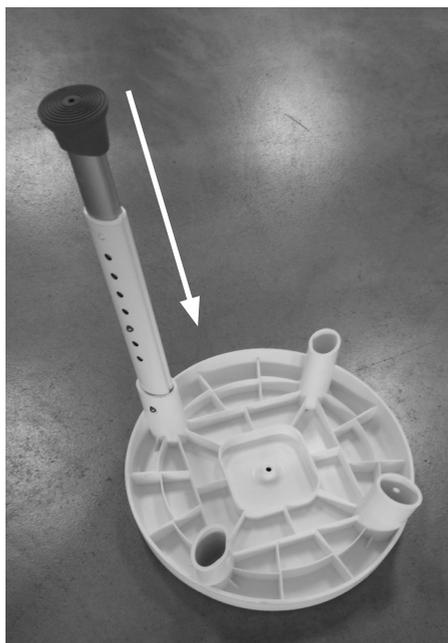

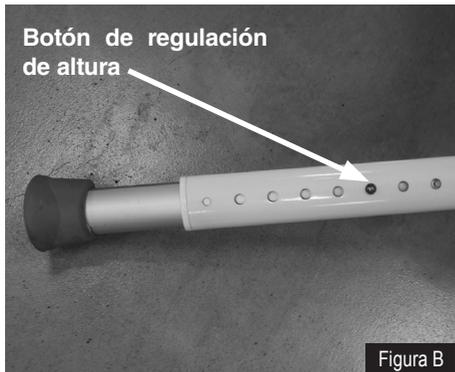

2. Ajuste las patas presionando el botón de regulación de altura (Figura B). Asegúrese de que las cuatro patas quedan todas a la misma medida.



Limpieza

La limpieza y desinfección debe realizarse regularmente (si cambia de usuario debe realizarse de manera obligatoria). Para limpiar utilice un jabón suave sin aditivos abrasivos.

Datos técnicos

- Carga máx. 110 kg
- Superficie de asiento: 34 cm
- Altura del asiento: 42 - 57 cm

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

