

ASIENTO BAÑERA CON RESPALDO (Ref. A816)

USO PREVISTO:

El asiento de bañera con respaldo actúa como un banco diseñado para evitar el uso del fondo de la bañera, facilitando la entrada y salir de ella. Reduce el riesgo de adoptar una posición peligrosa durante los procedimientos de sentado y de pie. El asiento de la bañera promueve la independencia del usuario durante las etapas de baño de la higiene personal diaria. El respaldo aumenta aún más la comodidad, ofreciendo una manera más fácil y segura de tomar un baño.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

El asiento de bañera brinda apoyo a personas mayores, usuarios de sillas de ruedas, personas con movilidad reducida de las extremidades inferiores, lumbar y cadera, y a todos aquellos que tienen dificultad para sentarse y ponerse de pie en la bañera. Para el uso del asiento de la bañera, se requiere la capacidad de sentarse de forma independiente. No se recomienda utilizar el asiento de la bañera si el usuario tiene problemas de equilibrio o de percepción.

ADVERTENCIAS E INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- No se debe superar el peso máximo del usuario indicado en las instrucciones de montaje.
- Si el usuario tiene problemas de movilidad o sufre trastornos del equilibrio, sugerimos pedir ayuda para entrar y salir de la bañera.
- Antes de cada uso, el usuario debe comprobar la integridad del asiento de la bañera.
- Durante el montaje, atenerse estrictamente a lo indicado en el Manual de Usuario.
- El riesgo de lesiones en los dedos puede aumentar durante el paso de selección de ancho de las patas y durante el proceso de instalación en la bañera.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el asiento esté estable en la bañera. Los topes de los extremos y las tiras de goma rectangulares deben estar correctamente apoyados al borde plano y al lateral de la bañera respectivamente.
- No modifique el asiento de la bañera y sus componentes de ninguna manera.
- No use el asiento de la bañera si está dañado o alterado de alguna manera. Las grietas y deformaciones pueden afectar fuertemente las prestaciones y seguridad del dispositivo.
- Durante el uso, evite posiciones que mantengan el peso del cuerpo demasiado hacia atrás o hacia adelante. Las posiciones incorrectas pueden provocar inestabilidad y vuelco del asiento de la bañera.
- Durante las etapas de sentado y de pie, el riesgo de deslizamiento puede aumentar debido al suelo mojado.
- El asiento de la bañera no debe almacenarse al aire libre.

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO:

El mantenimiento consiste en los procedimientos de limpieza y saneamiento. Para garantizar un uso seguro y un estándar adecuado de higiene, el usuario debe realizar estos procedimientos antes de cada uso.

Debe asegurarse del estado de la estructura del producto, sus componentes y el compruebe el apriete de los tornillos.

Para los procedimientos de limpieza y saneamiento, siga los pasos a continuación:

1. Se deben usar guantes.
2. Quitar la suciedad evidente antes de proceder a la desinfección más precisa.
3. Utilice agua o detergente no agresivo para el procedimiento de limpieza.
4. Limpiar con un paño seco y limpio.

REQUISITOS DE REUTILIZACIÓN:

El producto es apto para ser reutilizado por otros usuarios. Antes de ser reutilizado por otros, el producto debe limpiarse y desinfectarse correctamente.


Antes de ser utilizado por otros, el producto debe ser revisado por distribuidores cualificados.

PROCEDIMIENTO CORRECTO DE ELIMINACIÓN:

No deseche el producto con la basura doméstica normal. Pregunte a su autoridad local de antemano para desecharlo de manera correcta respetando el medio ambiente.

INFORME DE INCIDENTES:

Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este producto en info@ayudasdinamicas.com.

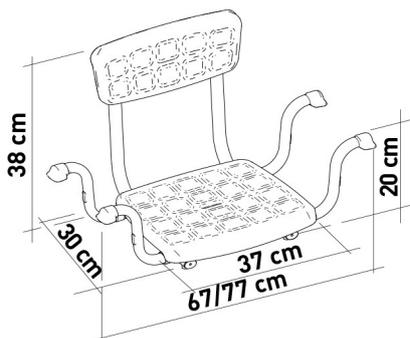

ASIENTO BAÑERA CON RESPALDO (Ref. AD816)

