

TABURETE TRIANGULAR PORTOFINO (Ref. AD817)

USO PREVISTO:

El taburete de ducha triangular permite una mayor independencia durante la higiene personal diaria en la ducha, reduciendo la fatiga debido a estar en posición de pie, así como riesgos de resbalones y lesiones. Las conteras de goma antideslizantes aseguran el agarre con el suelo.

Las patas ajustables permiten al usuario regular fácilmente la altura del asiento según sus necesidades. Además, el taburete de ducha se puede regular con diferentes alturas entre las patas delanteras y traseras. En particular, las patas delanteras pueden ser más bajas que las traseras: esto permite al usuario mantener posturas más correctas mientras se ducha, así como facilitar la incorporación y sentarse. Debido a su flexibilidad, el taburete de ducha se puede colocar incluso en suelos ligeramente irregulares. El taburete de ducha se puede mover fácilmente gracias a su peso ligero.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

El taburete de ducha triangular está dirigido a personas mayores, personas con movilidad reducida, con problemas de lumbares, rodillas o cadera, y a todas aquellas que tienen dificultad para mantener la posición de pie durante la higiene personal diaria en la ducha. El usuario está obligado a tener autonomía y equilibrio durante el proceso de sentarse y levantarse, así como tener la capacidad adecuada para mantenerse sentado. El taburete no debe utilizarse si el usuario tiene problemas relacionados con el equilibrio o trastornos de la percepción.

ADVERTENCIAS E INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- No se debe superar el peso máximo del usuario indicado en las instrucciones de montaje.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el taburete de la ducha esté correctamente ensamblado y en una posición estable.
- El taburete de ducha sólo se puede utilizar en superficies libres de obstáculos.
- Durante el montaje, siga estrictamente lo que se muestra en el Manual del Usuario.
- El riesgo de lesiones en los dedos puede aumentar durante el proceso de montaje.
- No se balancee sobre el taburete de la ducha, esto puede provocar que las piernas se resbalen o vuelquen. Mantenga siempre el taburete de ducha sobre sus 3 patas.
- No modifique el taburete de ducha y sus componentes de ninguna manera.
- No use el taburete de la ducha si está dañado o alterado de alguna manera. Las grietas y deformaciones pueden afectar fuertemente las prestaciones y seguridad del producto.
- Después de su uso, el taburete de ducha debe retirarse del plato de ducha para evitar cualquier obstrucción.
- No utilice el taburete de ducha para un propósito diferente al previsto.
- El taburete de ducha no debe almacenarse al aire libre.

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO:

El mantenimiento consiste en los procedimientos de limpieza y saneamiento. Para garantizar un uso seguro y un estándar adecuado de higiene, el usuario debe realizar estos procedimientos antes de cada uso.

Debe asegurarse del estado de la estructura del producto, sus componentes y el compruebe el apriete de los tornillos.

Para los procedimientos de limpieza y saneamiento, siga los pasos a continuación:

1. Se deben usar guantes.
2. Quitar la suciedad evidente antes de proceder a la desinfección más precisa.
3. Utilice agua o detergente no agresivo para el procedimiento de limpieza.
4. Limpiar con un paño seco y limpio.

REQUISITOS DE REUTILIZACIÓN:

El producto es apto para ser reutilizado por otros usuarios. Antes de ser reutilizado por otros, el producto debe limpiarse y desinfectarse correctamente.


Antes de ser utilizado por otros, el producto debe ser revisado por distribuidores cualificados.

PROCEDIMIENTO CORRECTO DE ELIMINACIÓN:

No deseche el producto con la basura doméstica normal. Pregunte a su autoridad local de antemano para desecharlo de manera correcta respetando el medio ambiente.

INFORME DE INCIDENTES:

Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este producto en info@ayudasdinamicas.com.

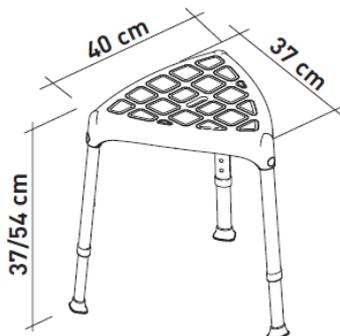

TABURETE TRIANGULAR PORTOFINO (Ref. AD817)

